

Dento-Viractis 95 ASPIGERM

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

POPIS: DENTO-VIRACTIS 95 ASPIGERM je doporučený pro čištění a dezinfekci sacího systému, plivátek a odlučovače amalgámu. KONCENTRÁT, ředění 0,5%

ROZSAH POUŽITÍ: Pro použití na sací systém i chirurgický sací systém

CHARAKTERISTIKA:

- Optimální a nepěnové čištění
- Odstraňuje vodní kámen – vyvinuto z citronu, citronová vůně
- Bez obsahu EDTA, CMR, fosfátů

BALENÍ: 1 litrová lahev s dávkovačem, 5 litrový kanystr. Příslušenství: 10 a 15 ml dávkovač pro kanystr.

ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – KONCENTRACE A DOBA KONTAKTU:

- BAKTERICIDNÍ: EN 13727 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 0,5% 15 min, EN 14561 - 2% 15 min
- KVASINKOCIDNÍ: EN 13624 - Candida albicans - 0,5% 15 min
- VIRUCIDNÍ: EN 14476 - Herpes virus simplex typ 1 - 0,25% 5 min, EN 14476PRV (HBV)) - 0,5% 1 min

SLOŽENÍ: Kationtové a aniontové surfaktanty, činidlo na vodní kámen, vůně.

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje D-LIMONEN. Může způsobit alergickou reakci.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

Příprava roztoku o síle 0,5% - Použijte 5 ml na každý 1 litr vody.

Použití: Propláchněte roztok přes každý sací okruh. Čas kontaktu 15 minut. Vypláchněte.

RIZIKOVÉ FRÁZE: R36 – Dráždí oči, R50 – Velice toxické pro vodní organismy.

BEZPEČNOSTNÍ FRÁZE: S26 – V případě vniknutí do očí okamžitě vypláchněte silným proudem vody a vyhledejte lékařské ošetření; S57 – Použijte vhodnou nádobu, abyste zabránili kontaminaci okolního prostředí; S60 – Tento materiál a jeho kanystr musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad; S61 – Zabraňte úniku do životního prostředí

CE CERTIFIKÁT OBDRŽEN V ROCE 2010. VEZRE LISTU: 1.0

VÝROBCE: HYGITECH – 25, rue Bleue – 75009 PARIS – France



Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 962 226-229
www.hufa.cz
hufa@hufa.cz