

# Dento-Viractis 75

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

- POPIS:** Dento-Viractis 75 je doporučený pro čištění a dezinfekci v jednom kroku.
- ROZSAH POUŽITÍ:** Pro použití na povrchy a opakovaně invazivní a neinvazivní zdravotnické prostředky, které nemohou být sterilizovány konvenčními způsoby nebo dezinfikovaný ponořením vzhledem ke své velikosti, konstrukci nebo materiálu.
- BALENÍ:** 750 mililitrová láhev s rozprašovačem, 5 litrový kanistr

### ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – DOBA KONTAKTU:

- BAKTERICIDNÍ: EN 13727 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; EN 14561 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; NF T 72-281 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae – 5 min; EN 1276 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; EN 13697 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min
- KVASINKOCIDNÍ: EN 13624 - Candida albicans - 5 min; EN 14562 - Candida albicans - 5 min; NF T 72-281 - Candida albicans, Aspergillus fumigatus - 5 min; EN 1650 - Candida albicans – 5 min; EN 13697 - Candida albicans - 5 min
- VIRUCIDNÍ: EN 14476 - Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, Hepatite B, Hepatite C, VIH - 5 min
- SPORICIDNÍ: NF T 72-281 Clostridium diffi cile, Bacillus subtilis – 5 min

**SLOŽENÍ:** Tekutý přípravek, TP2, pro profesionální použití, připraven k použití.  
DIDECYL DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE n°CAS 7173-51-5 0.25 g/kg. ALKYL BENZYL DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE n°CAS 63449-41-2 0.95 g/kg.

**UPOZORNĚNÍ:** Uchovávejte obal těsně uzavřený na suchém místě. Nevypouštějte zbytkový produkt do životní prostředí. Obal nemusí být likvidován jako nebezpečný odpad, likvidaci proveďte na výhradní odpovědnost vlastníka odpadu. Nepoužívejte obal opakovaně.

### INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

1. Doplňte 750ml láhev
2. Použijte DV75 na vhodný netkaný kus materiálu nebo přímo na povrch
3. Očistěte setřením povrch kontaminované plochy
4. Nechte produkt působit 5 minut. Neoplachujte
5. Použijte nové netkané textilie pro každé zařízení

**CE CERTIFIKÁT OBDRŽEN V ROCE 2015. VEZRE LISTU: 1.0**

**VÝROBCE:** HYGITECH – 25, rue Bleue – 75009 PARIS – France