

Dento-Viractis 75

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

- POPIS:** Dento-Viractis 75 je doporučený pro čištění a dezinfekci v jednom kroku.
- ROZSAH POUŽITÍ:** Pro použití na povrchy a opakovaně invazivní a neinvazivní zdravotnické prostředky, které nemohou být sterilizovány konvenčními způsoby nebo dezinfikovány ponořením vzhledem ke své velikosti, konstrukci nebo materiálu.
- BALENÍ:** 750 mililitrová láhev s rozprašovačem, 5 litrový kanystr

ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – DOBA KONTAKTU:

- BAKTERICIDNÍ: EN 13727 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; EN 14561 Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; NF T 72-281 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae – 5 min; EN 1276 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; EN 13697 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min
- KVASINKOCIDNÍ: EN 13624 - Candida albicans - 5 min; EN 14562 - Candida albicans - 5 min; NF T 72-281 - Candida albicans, Aspergillus fumigatus - 5 min; EN 1650 - Candida albicans – 5 min; EN 13697 - Candida albicans - 5 min
- VIRUCIDNÍ: EN 14476 - Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, Hepatite B, Hepatite C, VIH - 5 min
- SPORICIDNÍ: NF T 72-281 Clostridium diffi cile, Bacillus subtilis – 5 min

- SLOŽENÍ:** Tekutý přípravek, TP2, pro profesionální použití, připraven k použití.
DIDECYL DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE n°CAS 7173-51-5 0.25 g/kg. ALKYL BENZYL DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE n°CAS 63449-41-2 0.95 g/kg.

- UPOZORNĚNÍ:** Uchovávejte obal těsně uzavřený na suchém místě. Nevypouštějte zbytkový produkt do životního prostředí. Obal nemusí být likvidován jako nebezpečný odpad, likvidaci proveďte na výhradní odpovědnost vlastníka odpadu. Nepoužívejte obal opakovaně.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

1. Doplňte 750ml láhev
2. Použijte DV75 na vhodný netkaný kus materiálu nebo přímo na povrch
3. Očistěte setřením povrch kontaminované plochy
4. Nechte produkt působit 5 minut. Neoplachujte
5. Použijte nové netkané textilie pro každé zařízení

CE CERTIFIKÁT OBDRŽEN V ROCE 2015. VEZRE LISTU: 1.0

- VÝROBCE:** HYGITECH – 25, rue Bleue – 75009 PARIS – France



Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 962 226-229
www.hufa.cz
hufa@hufa.cz