

# Dento-Viractis 77 Surfaces

## NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

**POPIS:** DENTO-VIRACTIS 77 SURFACES je doporučený pro čištění a dezinfekci ploch mokrým utíráním – PŘÍMO K POUŽITÍ

**ROZSAH POUŽITÍ:** Pro použití na znovu použitelných medicínských zařízeních, které nejsou sterilizovatelné, ani ponořitelné do roztoku, pro užití na plochy. Lze použít i jako postřík na otisky či dezinfekci tzv. „podávky“.

### **CHARAKTERISTIKA:**

- Dezinfekční čistící prostředek s širokým spektrem účinnosti
- Jednoduše použitelný mokrým utíráním
- Příjemná vůně

**BALENÍ:** 1 litrová lahev s rozprašovačem, 5 litrový kanystr, balení 120 vlhčených ubrousků

### **ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – DOBA KONTAKTU:**

- BAKTERICIDNÍ: EN 1040 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - 5 min; EN 13727 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; EN 14561 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii - 5 min; NT T 72-190 - Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 15 min
- FUNGICIDNÍ - EN 1275 - Candida albicans, Aspergillus niger- 15 min; EN 13624 - Candida albicans - 5 min; EN 14562 - Candida albicans, Aspergillus niger - 5 min
- VIRUCIDNÍ - EN 14476 Adenovirus - 5 min; EN 14476 - Norovirus murin - 30 sec, BVDV (Hepatitis C) - 5 min, Herpes simplex virus typ 1 - 1 min, PRV (Hepatitis B) - 1 min, Rotavirus bovin - 5 min, Influenza virus type A/H1N1 - 10 sec, HIV - 30 sec; NF T 72-180 - Enterovirus Polio 1, Adenovirus typ 5, Orthopoxvirus of the vaccine - 15 min
- SPORICIDNÍ - EN 13704 - Clostridium difficile - 15 min

**SLOŽENÍ:** Alkylamin v hydro-alkoholovém roztoku, amfoterní surfaktanty

**UPOZORNĚNÍ:** Obsahuje D-LIMONEN a LINALOOL. Může způsobit alergickou reakci.

### **INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:**

1. Doplňte 1litrovou lahev s rozprašovačem
2. Použijte DV77 na vhodný netkaný kus materiálu
3. Očistěte setřením povrch kontaminované plochy
4. Neoplachujte a materiál poté vyhodte  
Celé opakujte, pokud je třeba

**RIZIKOVÉ FRÁZE:** R11 – Hořlavé, R36 – Dráždí oči

**BEZPEČNOSTNÍ FRÁZE:** S2 – Držte mimo dosah dětí, S9 – Uchovávejte v dobře ventilovaném prostředí, S16 – Neuchovávejte v dosahu zdroje ohně. Nekuřte. S25 – Zabraňte kontaktu s očima, S60 – Tento materiál a jeho kanystr musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad

**CE CERTIFIKÁT OBDRŽEN V ROCE 2008. VEZRE LISTU: 2.0**

**VÝROBCE:** HYGITECH – 25, rue Bleue – 75009 PARIS – France