

Dento-Viractis 77 Surfaces

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

POPIS: DENTO-VIRACTIS 77 SURFACES je doporučený pro čištění a dezinfekci ploch mokrým utíráním – PŘÍMO K POUŽITÍ

ROZSAH POUŽITÍ: Pro použití na znovu použitelných medicínských zařízeních, které nejsou sterilizovatelné, ani ponořitelné do roztoku, pro užití na plochy. Lze použít i jako postřik na otisky či dezinfekci tzv. „podávky“.

CHARAKTERISTIKA:

- Dezinfekční čistící prostředek s širokým spektrem účinnosti
- Jednoduše použitelný mokrým utíráním
- Příjemná vůně

BALENÍ: 1 litrová lahev s rozprašovačem, 5 litrový kanystr, balení 120 vlhčených ubrousků

ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – DOBA KONTAKTU:

- BAKTERICIDNÍ: EN 1040 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - 5 min; EN 13727 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 5 min; EN 14561 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii - 5 min; NT T 72-190 - Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 15 min
- FUNGICIDNÍ - EN 1275 - Candida albicans, Aspergillus niger - 15 min; EN 13624 - Candida albicans - 5 min; EN 14562 - Candida albicans, Aspergillus niger - 5 min
- VIRUCIDNÍ - EN 14476 Adenovirus - 5 min; EN 14476 - Norovirus murin - 30 sec, BVDV (Hepatitis C) - 5 min, Herpes simplex virus typ 1 - 1 min, PRV (Hepatitis B) - 1 min, Rotavirus bovin - 5 min, Influenza virus type A/H1N1 - 10 sec, HIV - 30 sec; NF T 72-180 - Enterovirus Polio 1, Adenovirus typ 5, Orthopoxvirus of the vaccine - 15 min
- SPORICIDNÍ - EN 13704 - Clostridium difficile - 15 min

SLOŽENÍ: Alkylamin v hydro-alkoholovém roztoku, amfoterní surfaktanty

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje D-LIMONEN a LINALOOL. Může způsobit alergickou reakci.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

1. Doplníte 1litrovou lahev s rozprašovačem
2. Použijte DV77 na vhodný netkaný kus materiálu
3. Očistíte setřením povrch kontaminované plochy
4. Neoplachujte a materiál poté vyhodte
Celé opakujte, pokud je třeba

RIZIKOVÉ FRÁZE: R11 – Hořlavé, R36 – Dráždí oči

BEZPEČNOSTNÍ FRÁZE: S2 – Držte mimo dosah dětí, S9 – Uchovávejte v dobře ventilovaném prostředí, S16 – Neuchovávejte v dosahu zdroje ohně. Nekuřte. S25 – Zabraňte kontaktu s očima, S60 – Tento materiál a jeho kanystr musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad

CE CERTIFIKÁT OBDRŽEN V ROCE 2008. VEZRE LISTU: 2.0

VÝROBCE: HYGITECH – 25, rue Bleue – 75009 PARIS – France



Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 962 226-229
www.hufa.cz
hufa@hufa.cz