

Dento-Viractis 79 Surfaces

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

POPIS: DENTO-VIRACTIS 79 SURFACES je doporučený pro čištění a dezinfekci neinvazivních malých medicínských přístrojů a ploch (medicínského a dentálního vybavení) – PŘÍMO K POUŽITÍ

ROZSAH POUŽITÍ: Pro použití na hladkých površích medicínských přístrojů a ploch

CHARAKTERISTIKA:

- Dezinfekční čisticí prostředek s širokým spektrem účinnosti, efektivní na H1N1 virus do 1 min.
- Ubrousky jsou velké, silné, odolné a parfemované.
- Jednoduchý POP-UP systém pro rychlé a pohodlné použití a zabránění vypařování tekutiny.

BALENÍ: Balení s víčkem se 100 ubrousky

ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – DOBA KONTAKTU:

- BAKTERICIDNÍ: při znečištění: EN 1040 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli-5 min; EN 13697 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus; EN 14561 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae – 5 min; čisté podmínky: MRSA 5 min; čisté podmínky: EN 1276 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli - 5 min; čisté podmínky: EN 14348 Mycobacterium terrae 15 min; EN 14563 Mycobacterium terrae
- FUNGICIDNÍ: při znečištění: EN 1275 Aspergillus niger 5 min; EN 1650 Aspergillus niger; čisté podmínky: EN 13697 Aspergillus niger 5 min
- KVASINKOCIDNÍ: při znečištění: EN 1275 Candida albicans 5 min; EN 1650 Candida albicans; čisté podmínky: EN 13624 Candida albicans 5 min; EN 13697 Candida albicans
- VIRUCIDNÍ: při znečištění: EN 14476 Herpes Simplex Virus 1 min; čisté podmínky: H1N1 1 min, HBV, HCV, Adenovirus, Rotavirus 15 min

SLOŽENÍ: Méně než 5% neionického surfaktantu, parfémů včetně limonenu; dezinfektant: denaturovaný alkohol, benzalkonium chlorid, isopropyl alkohol.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

1. Odstraňte ochranný obal z uzavíratelného obalu
2. Použijte ubrousek na vybavení či plochu
3. Ponechejte po setření ubrouskem bez zásahu
4. Neoplachujte
5. Dobře uzavřete víčko balení po použití

BEZPEČNOSTNÍ FRÁZE: S2 – Držte mimo dosah dětí

CE CERTIFIKÁT OBDRŽEN V ROCE 2008. VEZRE LISTU: 2.0

VÝROBCE: HYGITECH – 25, rue Bleue – 75009 PARIS – France



Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 962 226-229
www.hufa.cz
hufa@hufa.cz