

Dento-Viractis Instrugerm 51

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

POPIS: DENTO-VIRACTIS INSTRUGERM 51 je doporučený pro čištění a před-dezinfekci stomatologických nástrojů. Nástroje jsou vkládány po použití přímo do roztoku, poté sterilizovány či chemicky dezinfikovány.

ROZSAH POUŽITÍ: Medicínské nástroje, znovu použitelná teplotně odolná i teplotně citlivá medicínská zařízení

CHARAKTERISTIKA:

- Odstraňuje rezidua proteinu, zesíleno přítomností surfaktantů s detergentem, silně smáčivý efekt
- Redukuje riziko křížové kontaminace: roztok je eliminován nekontaminovaný
- Kompatibilní s ultrazvukovými čističkami

BALENÍ: 1 litrová lahev s 20 ml dávkovačem, 5 litrový kanystr

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Dávkovač 10, 15 a 20 ml pro 5 litrový kanystr

ANTIMIKROBIÁLNÍ AKTIVITA – DOBA KONTAKTU A KONCENTRACE:

- BAKTERICIDNÍ EN 13727 - Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii - 0,1% 15 min
- KVASINKOCIDNÍ EN 13624 - Candida albicans - 0,5% 15 min
- VIRUCIDNÍ EN 14476 - Norovirus murin 0,5% 15 min, BVDV (testováno HCV), Herpes simplex virus typ 1 PRV (testováno HBV) - 0,4% 1 min HIV 0,4% 15 min

SLOŽENÍ: Aniontové a kationtové činidlo, sekvestrant, biguanid, parfém

UPOZORNĚNÍ: Obsahuje alkohol ethoxyl C9 C11 8 OE a polymerický chlorhydrát biguanid

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

Příprava (0,5% zředěný roztok):

1. Použijte ochranné pomůcky (brýle a rukavice)
2. Použijte dezinfekční nádobu s víkem
3. Rozřeďte 5 ml přípravku na 1 litr vody

Roztok musí být vyměněn, jakmile dojde k jeho znečištění nebo jednou denně.

Použití:

1. Úplně ponořte nástroje do roztoku
2. Čas ponoření: 15 minut
3. Důkladně opláchněte

RIZIKOVÉ FRÁZE: R38 – Dráždivé pro kůži, R41 – Riziko vážného poškození zraku, R43 – Může způsobit zvýšenou citlivost kůže, R50 – Velice toxické pro vodní organizmy

BEZPEČNOSTNÍ FRÁZE: S26 – V případě vniknutí do očí okamžitě vypláchněte silným proudem vody a vyhledejte lékařské ošetření; S36/37/39 – Používejte odpovídající ochranné pomůcky – oblečení, rukavice a ochranu očí; S45 – V případě nehody nebo pokud se necítíte dobře, vyhledejte ihned lékařské ošetření (ukážte etiketu, pokud to bude možné); S57 – Použijte vhodnou nádobu, abyste zabránili úniku do životního prostředí; S60 – Tento materiál a jeho kanystr musí být zlikvidován jako nebezpečný odpad; S61 – Zabraňte úniku do životního prostředí