



Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek určený na dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků.

Šetrný & Účinný

desam[®] OX

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Bez nepříjemného zápachu - použití i v přítomnosti pacientů
- Šetrný k dezinfikovaným materiálům
- Ohleduplný k životnímu prostředí
- Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

CE 1023

Oblast použití

desam[®] OX je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (vč. operačních sálů, JIP, neonatologie, rehabilitace). Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Je vhodný také na citlivé plasty (plexisklo). Přípravek lze používat i v přítomnosti pacientů.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia / Rota / MVA, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desam[®] OX se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky. Není určený k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.



Složení

100 g přípravku **desam[®] OX** obsahuje následující účinné látky:

- 11 g Peroxid vodíku
- 2 g Didecyldimethylammonium chloride
- 2,8 g Alkyldimethylbenzylammonium chloride

Další složení:

povrchové aktivní látky, parfém

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty.

Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, barevné kovy (měď, mosaz), polyamid, kůže, gumy, barevně nestabilní, porézní a poškozené materiály

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desam ox 1 l	12/Karton	70000070
Desam ox 5 kg	1/Kanistr	319016



Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com