

## INCIDIN PLUS

Kapalný koncentrovaný dezinfekční a čistící prostředek určený dezinfekci ploch a povrchů předmětů.

**INCIDIN PLUS** je deklarován jako zdravotnický prostředek, třída IIa



Výhody pro uživatele:

- účinný proti bakteriím (včetně TBC), mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a obaleným i neobaleným virům
- neobsahuje aldehydy ani KAS, antimikrobiální účinek je zajištěn obsahem - glukoprotaminu
- čistící účinek, svěží vůně - neobsahuje těkavé účinné složky
- účinkuje v nízkých koncentracích
- nepůsobí agresivně vůči čistěným materiálům
- je vhodný jak pro ruční, tak pro strojové čištění a dezinfekci
- je vhodný k dezinfekci a mytí podlah, ošetřených polymery - doložená kompatibilita

Složení: antimikrobiální účinná látka, neionogenní tenzidy, komplexotvorné látky, látky ovlivňující rozpouštěcí schopnost a pěnovost, barvivo, parfém

Obsah účinných látek ve 100 g Incidinu plus: 26,0 g glukoprotaminu

Doporučené ředění při použití	koncentrace ( % )	doba expozice
Účinnost proti bakteriím( včetně MRSA)a kvasinkám	0,25	15 min
Účinnost proti TBC	0,25 0,50 1,00	1 h 30 min 15 min
Účinnost proti ostatním mykobakteriím	0,5	15 min
Účinnost proti vaccinia a BVDV (účinnost proti obaleným živočišným virům HIV, HBV, HCV) dle DVV/RKI	0,25 0,50	30 min 15 min
Účinnost proti rotavirům	0,50	15 min
Účinnost proti herpesvirům	0,10	5 min
Účinnost proti jiným virům: Adeno	1,00	1 h
Papova	0,50	1 h

Oblast použití:

- veškerá zdravotnická zařízení, ozdravovny, léčebny, kojenecké ústavy, laboratoře
- výroby konečných lékových forem, infuzních roztoků, čisté provozy výrobních podniků
- komunální hygiena, různá veřejná zařízení - hotely, lázně, sportovní zařízení, školy, provozovny kadeřnictví, pedikúry apod.

**Návod k použití:** před použitím je nutné zředit koncentrát studenou vodou na vhodnou koncentraci studenou pitnou vodou. Nepřidávejte jiný čisticí ani dezinfekční prostředek. Roztok se aplikuje na omyvatelné plochy a povrchy a nechá se schnout, nevytírá se do sucha. Pouze pro profesionální použití. Poznámka: 10 litrů pracovního roztoku stačí na plochu 50 - 100 m<sup>2</sup> podle stupně znečištění. Použité mopy a hadry po ukončení práce vyprat nejlépe v horké vodě a vysušit. Přípravek uchovávejte v původním obalu při teplotách 0°C až +25 °C. Nepřipusťte vniknutí koncentrátu do kanalizace. Obaly je možno spalovat v zařízeních k tomu určených, vypláchnutý obal není nebezpečným odpadem.

**Bezpečnost:** Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (Nebezpečí; Akutní toxicita, Kategorie 4, H332; Žíravost pro kůži, Kategorie 1B, H314; Akutní toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 1, H400) nebo směrnice 1999/45/ES (C; ŽÍRAVÝ; R22; N; NEBEZPEČNÝ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; R20; R34; R50).  
Před použitím čtěte příložené pokyny.

Při práci s koncentrovaným přípravkem dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení, které naleznete v příslušném bezpečnostním listu přípravku.

Bezpečnostní pokyny:

- způsobuje poleptání, může poškodit zdraví při požití
- při práci s koncentrátem používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky, především k ochraně očí a kůže, tj. zejména vhodné ochranné brýle nebo štítek a při každé práci ochranné rukavice. Po práci se dobře umyjte a ošetřete vhodným reparačním krémem (Silonda)
- uchovávejte mimo dosah dětí
- informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

První pomoc: pokyny pro první pomoc a ochranných pomůckách jsou uvedeny na aktuálním bezpečnostním listu.

**Doba použitelnosti:** 48 měsíců

**Balení:**

6 l PE kanystr

2 l PE láhev s integrovaným dávkovačem baleno v kartonu po 3 ks