

VHODNÝ DO
NEMOCNICČNÍCH
KUCHYNÍ



DESAM® EXTRA

DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ PLOCH A POVRCHŮ

- Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku aminu a KAS
- Neobsahuje aldehydy ani chlor
- Vhodný do prostor se zvýšeným výskytem mikroorganismů
- Velmi dobré čistící vlastnosti
- Účinný od 0,25%
- Snadné dávkování pomocí dávkovací lahve

Účinný kapalný dezinfekční přípravek s mycími účinky určený k dezinfekci a mytí ploch, povrchů a prostor se zvýšeným rizikem růstu bakterií, mikroskopických vláknitých hub a plísní. Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty. Desam Extra má rychlý a spolehlivý účinek, a to při nízkých koncentracích pracovních roztoků (od 0,25% koncentrace). Díky kombinovanému účinku kvarterních amoniových sloučenin a aminů je bez zápachu, a proto je vhodný pro použití i v přítomnosti personálu a pacientů (např. na porodnická a novorozenecká oddělení, ARO, JIP, rehabilitace a léčebny).

Složení:

Aktivní látky:

- Alkylbenzyltrimethylammonium chloride,
- Didecyldimethylammonium chloride,
- N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Spektrum účinnosti:

- Baktericidní vč. MRSA, virucidní (BVDV, Vaccina), tuberkulocidní, mykobaktericidní, fungicidní

Použití	Koncentrace	Expozice
Čištění a dezinfekce ploch a povrchů ve zdravotnictví a obecné praxi	1%	15 min
Dezinfekce povrchů při zvýšené biologické zátěži	0,25%	15 min
Dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem infekce	0,5%	15 min

Účinnost	Testovací norma	Koncentrace	Expozice
Baktericidní	S. Aureus, P. Aeruginosa, E. Hirae	EN 13727, EN 14561	0,25% 15 min
	MRSA	SOP	0,5% 2 min
Fungicidní	C. Albicans, A. Niger	EN 14562	0,5% 15 min 1% 15 min
	M. Terrae	EN 14348	0,25% 15 min
Mykobaktericidní	M. Avium, M. Terrae	EN 14563	0,5% 15 min 1% 15 min
	BVDV	DVV/RKI	0,25% 5 min
Virucidní	Vaccinia	DVV/RKI	0,5% 5 min

Návod na použití:

Pro dezinfekci se ředí vodou o teplotě 20 - 25 °C na příslušnou koncentraci roztoku. 0,5 % roztok se připraví zředěním 5 ml koncentrátu v 995 ml vody. Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Plochy a předměty, které byly ošetřeny Desamem Extra a mají přijít do přímého styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně) opláchnuty pitnou vodou.

Aplikace:

Dezinfekce ploch a předmětů: Předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětů otřete textilií smočenou v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze aplikovat postřikem.

Oblast použití:

Porodnická a novorozenecká oddělení, ARO, JIP, rehabilitace a léčebny, lékařské ordinace, oddělení zdravotnických zařízení diagnostika, laboratoře, ambulantní zdravotnická zařízení. Vhodný také do potravinářství, stravovacích provozů, veterinární praxi a institucí.

Balení:

- 1 l láhev s dávkovacím hrdlem,
- 5 kg kanistr

Exspirace:

- 24 měsíců

Typ přípravku:

- Biocidní přípravek



Logistické údaje:

EAN produktu	Název výrobku	Obsah	Počet ks v kartonu	Počet ks na paletě
8594005392229	Desam Extra	1 l	12	288
8594005392243	Desam Extra	5 kg		96

Výrobce:

BOCHEMIE a.s., Lidická 326, CZ – 735 95 Bohumín, tel.: 596 091 111, www.bochemie.cz
 • Manažer pro prodej ČR: mob: + 420 724 013 101 • Manažer pro prodej SR: +421 903 262 932
 Manažer pro distributory ČR+SR:+420 724 176 368 • Produktový manažer ČR+SR: +420 724 913 393

