

zeta 7 spray

IMPRESSIONS



**SPRAY DISINFECTANT
FOR IMPRESSIONS**

READY TO USE



U118205/A

Zhermack[®]
CLINICAL



PG CE 0123

Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (Rovigo) - Italy
tel. +39 0425 597611 - fax +39 0425 53596
www.zhermack.com - info@zhermack.com

Last Update: 12/2009

Dezinfekční přípravek připravený k použití pro dezinfekci otisků.

Zeta 7 Spray je dezinfekční přípravek připravený k použití bez obsahu aldehydů s širokým rozsahem účinku, který byl vyroben a testován v souladu s novými harmonizovanými evropskými předpisy o dezinfekci. Zeta 7 Spray byl vyvinut pro vysokoúrovňovou a rychlou dezinfekci otisků ze silikonu (pro přídavky a kondenzaci), alginátů, polyetherů a polysíranů: otisk nemění své vlastnosti, nedochází k významným rozměrovým změnám a je kompatibilní se sádrou. Účinek přípravku Zeta 7 Spray zlepšuje hladkost sádry na povrchu otisků, snižuje tvorbu bublin a umožňuje věrnější reprodukci detailů.

SLOŽENÍ: 100 g přípravku Zeta 7 Spray obsahuje 83 g ethanolu, 10 g 2-propanolu, neionové tenzidy, aditiva, pomocné látky a potřebné množství vody do 100.

ROZSAH ÚČINKU: Baktericidní, fungicidní (testováno na *Candida albicans*), tuberkulocidní, virucidní. Aktivita v suspenzi a povrchová aktivita testována v souladu s normami EN13727, EN13624, EN14348, EN14561, EN14562, EN14563. Povrchová aktivita testována v souladu s normou EN14563. Virucidní aktivita testována v souladu s normou EN14476.

POUŽITÍ: Okamžitě po provedení otisku ho opláchněte pod tekoucí vodou po dobu 30 sekund. Nastříkejte přípravek Zeta 7 Spray až do úplného pokrytí povrchu otisku. Nechejte vypařit.

| | | |
|----------------------|----------|--|
| Virucidní aktivita: | 3 minut | “špinavé” podmínky (EN 14476) |
| Aktivita v suspenzi: | 1 minuta | baktericidní (EN13727) |
| | 1 minuta | fungicidní (EN14562, testováno na <i>Candida albicans</i>) |
| | 2 minuty | tuberkulocidní (EN14348) |
| Povrchová aktivita: | 2 minuty | tuberkulocidní (EN14563) |

VÝSTRAHY, OPATŘENÍ A PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Tento výrobek je určen pro kvalifikované pracovníky, kteří jsou obeznámeni s požadovanými bezpečnostními normami. Použijte ochranné rukavice. Pracujte v dobře větraných prostorách. Dobře uzavřený výrobek skladujte na suchém a chladném místě. Zabraňte kontaktu přípravku Zeta 7 Spray s materiály citlivými na alkohol. Zabraňte kontaktu přípravku Zeta 7 Spray s ostatními dezinfekčními nebo čisticími přípravky. Tento výrobek je hořlavý. Případné mírné rozdíly v parfemaci jsou způsobeny přítomností přírodních látek a neznamenaají újmu na kvalitě produktu.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE: R11: Vysoce hořlavý. - R36: Dráždí oči.

R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

MSDS (Záznamový list o bezpečnosti materiálu) lze stáhnout ve formátu PDF z naší webové stránky: www.zhermack.com