

Porcelain Repair Kit

POZNÁMKA: Pro detailní popis, indikaci, návod a varování viz instrukce v balení u jednotlivých produktů.

Indikace: Oprava porcelánu spojeným s kovovými korunkami, můstky, inleji a onleji.

Návod k použití:

Příprava povrchu

1. Izolujte okolní gingivální tkáň a náhrady dobře pečetěným kofferdamem pomocí EtchArrest®, který tvoří ochranu díky neutralizaci kyseliny. EtchArrest ponechte na místě po celou dobu leptání.
 - a. Porcelánové povrchy: Jemně porcelánový povrch abradujte vysokorychlostním diamantovým brouskem. Odstraňte přítomné kompozitum.
 - b. Porcelánové povrchy s exponovaným kovem: Izolujte oblast pomocí Opaldam® pryskyřicové ochrany a použijte diamantový brousek nebo mikroabrazi k abradování kovového povrchu.
 - c. Oprava porcelánu se zubními povrchy: Jemně abradujte porcelánový povrch vysokorychlostním diamantovým brouskem. Odstraňte přítomné kompozitum.
ABYSTE ZABRÁNILI ZRANĚNÍ, MUSÍTE CHRÁNIT OD PORCELAIN ETCH EXPONOVANOU SKLOVINU.
Leptejte a silanizujte.

Varování:

1. Pára kyseliny fluorovodíkové dráždí dýchací cesty a v chronických případech může způsobit poškození.
2. Odstraňte uzávěr z Porcelain Etch.
3. Bezpečně připevněte kanylu Inspiral® Brush.
4. Před intraorální aplikací ověřte průtok leptadla.
5. Pomalu vytlačte rovnoměrnou vrstvu na připravený porcelán a/nebo kov a nechte působit 90 sekund. Varování: Nepoužívejte Porcelain Etch k leptání exponované skloviny nebo povrchů dentinu.
6. Odsajte kyselinu z povrchu, důkladně opláchněte a vysušte.
7. Aplikujte Ultra-Etch® na 5 sekund pro odstranění zbytkových solí na porcelánu po leptání kyselinou fluorovodíkovou. Opláchněte a vysušte. Poznámka: Používáte-li k neutralizaci kyseliny EtchArrest® smíchejte gel kyseliny s neutralizací, odsajte a opláchněte.
8. Porcelán bude mít mrazivý vzhled. V jiném případě opakujte krok 7.
9. Odstraňte uzávěr ze Silanu.
10. Bezpečně připevněte kanylu Black Mini® Brush.
11. Před intraorální aplikací ověřte průtok Silanu.
12. Aplikujte Silan a nechte jej působit 1 minutu. Je-li třeba, dosušte.
13. Pro opravu porcelánu s exponovanou sklovinou nebo dentinem naleptejte povrch 35% kyselinou fosforečnou po dobu 20 sekund. Opláchněte a nechte povrch vlhký.

Bondování

14. Aplikujte vrstvu Peak®Universal Bond pomocí Inspiral®Brush – jemně rozrušte po dobu 10 sekund.
15. Vysoušejte 10 sekund s použitím ¼ - ½ tlaku vzduchu. Preparace by měla vypadat leskle.
16. Polymerujte 10 sekund. (20 sekund u světél s výkonem <600mW/cm2).

Restaurujte

17. Restaurujte pomocí vybraného kompozita.
18. U povrchů s exponovaným kovem aplikujte tenkou vrstvu PermaFlo® Dentin Opaquer přes kov. Polymerujte a dokončete restauraci kompozitem.


Varování a Opatření:

1. Výpary kyseliny fluorovodíkové dráždí dýchací cesty a v chronických případech mohou způsobit jejich poškození.
 2. Nepoužívejte Porcelain Etch k leptání exponované skloviny a povrchů dentinu.
 3. Pozorně čtěte všechny instrukce.
 4. Pacient, lékař i asistent musí mít ochranné brýle při manipulaci s tímto produktem.
 5. Před intraorální aplikací ověřte průtok. Zaznamenáte-li odpor, vyměňte kanylu a znovu zkontrolujte. Používejte pouze doporučené kanyly.
 6. Zabraňte polknutí jakéhokoliv produktu.
 7. Stříkačky znovu uzavřete a mezi jednotlivými pacienty je otřete a dezinfikujte dezinfekcí určenou pro lékařské pomůcky.
 8. Použité kanyly a prázdné stříkačky řádně zlikvidujte.
 9. Abyste zabránili vdechnutí dráždivých výparů Porcelain Etch, odsávejte blízko oblasti zákroku.
 10. Pryskyřice mohou způsobovat přecitlivělost. Vyhněte se opakovanému kontaktu nepolymerované zubní pryskyřice s pokožkou. Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na akryláty nebo jiné pryskyřice. Vyskytne-li se alergická reakce, dermatitida nebo vyrážky, vyhledejte lékaře.
 11. Během restaurace odkloňte operační světlo, abyste zabránili předčasné polymeraci.
 12. Bondovací systémy, které tuhnou na světle, jsou citlivé na okolní světlo. Stříkačky by se měly po použití znovu uzavřít, abyste zabránili nechtěné polymeraci. Přikryjte špičky stříkaček gázou, jsou-li delší dobu vystaveny okolnímu světlu.
 13. Použijte adekvátní izolaci.
 14. Delší dobu skladujte pryskyřice v lednici, aby se nezkrátila doba životnosti.
 15. Kanyly jsou jednorázové. Nepoužívejte je znovu, abyste zabránili kros-kontaminaci.
 16. Pro optimální sílu bondu nepoužívejte vlhký a olejový vzduch.
- Poznámka: Bezpečnostní listy a další informace o našich produktech najdete na www.ultradent.com.

Ultradent Porcelain Repair Kit
REF/UP 1108

Obsah:

- 1-1,2ml stříkačka OpalDam
- 1-1,2ml stříkačka EtchArrest
- 1-1,2ml stříkačka Porcelain Etch
- 1-1,2ml stříkačka Silane
- 1-1,2ml stříkačka Peak Universal Bond
- 1-1,2ml stříkačka PermaFlo Dentin Opaquer
- 20 – kanyla Black Mini Brush
- 20 – kanyla Micro 20 gauge
- 20 – kanyla Black Micro
- 20 – kanyla Inspiral Brush

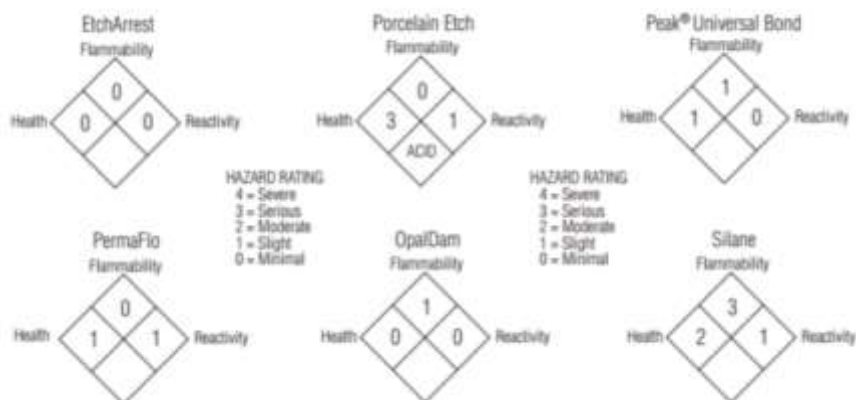

Stupnice rizika:
4 – velmi vážné 3 – vážné 2 – střední 1-mírné 0 - minimální

Stříkačky Ultradent mají vyraženo datum expirace skládající se z 1 písmena a 3 číslic na boku stříkačky. Písmeno značí výrobní šarže, 3 číslice znamenají datum expirace: první 2 číslice = měsíc, třetí číslice = poslední číslice roku.



hořlavý




žravina



recyklovatelný



toxický

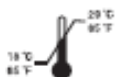

uchovávat v chladu



katalogové číslo



spotřebujte do data



pouze pro profesionální použití



šarže



zdravotní riziko



nepoužívejte opakovaně – zabraňte křížové kontaminaci



čtěte návod k použití



Ultradent Products GmbH
An Weidhofer Berg 30
51149 Cologne
Germany

Porcelain Repair Kit



Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
505 West 10000 South
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in USA

For SOS please visit our website:
www.ultradent.com



© Copyright 2012 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.
1008.10 04/13