

PULPDENT®

Etch-Rite™

Leptací gel — 38% kyselina fosforečná

Etch-Rite je tixotropní leptací gel s kyselinou fosforečnou, který zůstává na místě a nestéká. Dávkování pomocí předem ohnutých špiček aplikátoru s malým průměrem umožňuje přesné umístění gelu i v relativně nepřístupných oblastech. Etch-Rite se snadno smývá vodou.

POPIS VÝROBKU

Leptací gel - 38% kyselina fosforečná

INDIKACE

Pro leptání dentinu, skloviny a skloionomerního cementu

KONTRAINDIKACE

Neaplikujte na měkké tkáně

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připravte zub a očistěte povrch skloviny, který má být leptán, pomocí kaše z pemzy nebo profylaktické pasty bez obsahu oleje. Důkladně opláchněte a osušte.
2. Bezpečně připevněte kanylu luer lock velikosti 25 ke stříkačce. Začněte vytlačovat na podložce, ne v ústech pacienta. Netlačte na píst palcem. Pro bezpečné a kontrolované dávkování položte píst do dlaně a palcem, ukazováčkem a prostředníčkem zatáhněte za válec injekční stříkačky. Netlačte píst do válce silou.
3. Doporučená doba leptání pro sklovinu je 15-20 sekund a pro dentin je 15 sekund. Etch-Rite nanášejte pokud možno nejprve na sklovinu a poté na dentin. Nechte na dentinu 15 sekund. Ihned po použití uzavřete stříkačku.
4. Opláchněte Etch-Rite velkým množstvím vody. Nenarušujte tento povrch.
5. Ponechte povrch vlhký nebo povrch vysušte čistým, neznečištěným vzduchem, podle návodu k použití pro bondovací systém, který používáte.

Poznámka: Naleptaná sklovina by měla vypadat křídově bílá. Pokud ne, znovu naneste leptací gel na sklovinu na 20 sekund a opláchněte velkým množstvím vody.

VAROVÁNÍ:

Pokud se Etch-Rite dostane do kontaktu s kůží nebo měkkými tkáněmi, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

- Skladujte pevně uzavřené v původním obalu při pokojové teplotě. Chraňte před přímým světlem, extrémními teplotami, kontaminací a zdroji zapálení.
- Doba použitelnosti neotevřeného výrobku: 2 roky od data výroby.
- Ihned po použití znovu uzavřete uzávěrem.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ UDÁLOSTI

Jakékoli závažné nepříznivé události týkající se produktu by měly být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém k události došlo, nebo jinému příslušnému regulačnímu úřadu.

Hlášení závažné nepříznivé události je třeba zaslat na adresu:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Poznámka: Před aplikací u každého pacienta použijte jednorázové návleky/obaly na dávkovače pro opakované použití. Další informace naleznete na: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Poznámka: Seznam látek obsažených v tomto produktu naleznete v bezpečnostním listu Safety Data Sheet.

Rx only

