

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

CANAL DETECTOR

Indikátor vstupů kořenových kanálků

SLOŽENÍ:

modrý metylén, polypropylenglykol, čištěná voda

BALENÍ:

Injekční stříkačka 2 ml včetně sady štětcových aplikátorů

POUŽITÍ:

Modré barvivo obsažené ve výrobku proniká do vstupů kořenových kanálků a zbarvuje kanálky do modra. Díky tomu usnadňuje jejich lokalizaci a nalezení prasklin.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před ošetřením zašroubujte štětcový aplikátor do stříkačky.

Po odstranění dentinu v místech, kde lze očekávat vstupy kořenových kanálků, naneste jednu až tři kapky přípravku na dno kavity, vyčkejte 5-10 sekund a kavitu vypláchněte a vysušte.

Jasně modré body indikují vstupy kořenových kanálků.

Po použití vytáhněte píst stříkačky, aby přípravek nevytekl, vyšroubujte aplikátor a stříkačku uzavřete bílou šroubovací zátkou.

Výrobek lze použít opakovaně, zatímco aplikátor lze použít jen jednou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s výrobkem používejte kofferdam. Používejte rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv.

KONTRAINDIKACE:

Nepoužívejte u pacientů přecitlivělých na složky výrobku.

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v originálním obalu při teplotě do 25 °C.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

Uchovávejte mimo dosah dětí.

PŘÍPRAVEK JE URČEN POUZE K DENTÁLNÍMU POUŽITÍ