

Výrobce : Cerkamed Wojciech Pawlowski
ul . E.Kwiatkowskiego 1
37 - 450 Stalowa Wola
POLAND

YELLOW PORCELAIN ETCH GEL K LEPTÁNÍ PORCELÁNU

AKTIVNÍ LÁTKY

9,5% kyselina fluorovodíková

SADA OBSAHUJE

1 stříkačku (2ml) leptadla porcelánu
sadu pružných aplikátorů

YELLOW PROCELAIN ETCH se používá k leptání porcelánu při opravě náhrad a rovněž k přípravě porcelánových fazet, korunek a inlejí před cementováním.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Izolujte operační pole kofferdamem.
2. Odstraňte bezpečnostní zátku a našroubujte modrý pružný aplikátor na stříkačku s leptadlem porcelánu.
3. Naneste malé množství leptacího gelu na připravené místo zákroku (matné a suché), okamžitě po použití stříkačku uzavřete bezpečnostní zátkou.
4. Po 60 sekundách vypláchněte leptací gel a důkladně vysušte operační pole.
5. Podle pokynů výrobce k použití aplikujte silan.

UPOZORNĚNÍ

Žiravina – zamezte styku s pokožkou a sliznicemi, při zasažení okamžitě vypláchněte velkým množstvím tekoucí vody, v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. Zamezte styku s očima, v případě zasažení oči s otevřenými víčky okamžitě důkladně vypláchněte tekoucí vodou, obraťte se na očního lékaře. Při požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při provádění oprav na zubní náhradě v ústní dutině pacienta je nezbytné použít kofferdam a ochranu očí pacienta. Při leptání používejte vzduchový odsávací systém. Pracovníci musí používat ochranný oděv, rukavice a ochranný štít.

Pracovní postup



www.cerkamed.pl

UCHOVÁVÁNÍ:

Uchovávejte v původním, těsně uzavřeném obalu. Nevystavujte slunečnímu záření.
Uchovávejte při teplotě 5-25°C