

HYDROSPEED

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VYSOCE PŘESNÝ A-SILIKON

TECHNICKÁ DATA

Hydrospeed HD BR je vysoce přesný polyvinyl-siloxanový přísadový silikonový materiál umožňující přesný záznam skusu pro snadnější konstrukci modelu. Má následující vlastnosti:

- Barva: růžová
- Balení: sada dvou kazet s poměrem 1 : 1, každá 50 ml
- Příslušenství: 6 zelených směšovacích hrotů EcoMix BR + 6 čistých intra-orálních hrotů
- Lineární rozměrová změna: <0,2%
- Tvrdost: 90A
- Pracovní doba: 45 s
- Doba setrvání v ústech (maximum pro jeden kompletní oblouk): 55 s

INDIKACE


- Záznam intra-orálního skusu
- Formování korunek, můstků, inlayů a onlayů
- Záznam kousnutí pro ortodontické potřeby

ZPŮSOB APLIKACE

- Kazety Hydrospeed HD BR jsou kompatibilní se všemi dávkovacími pistolemi (poměr 1: 1) na trhu, včetně dávkovací pistole ITENA.
- Veškeré silikonové směšovací hroty vhodné pro vysoké viskozity (průměr 6,5 mm) pro záznam při skusu mohou být použity s kazetami Hydrospeed HD BR.

MONTÁŽ

1. Vložte kazetu do modrého vodičího kroužku.
2. Uzamkněte na místě otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Odstraňte těsnící víčko a vytlačte část výrobku, dokud tyto dva otvory neprodukují materiál stejnou rychlostí.
4. Do zeleného hrotu EcoMix BR namontujte intra-orální hrot (je-li to nutné) a upevněte sestavu na kazetu s 90° směrem ve směru hodinových ručiček.

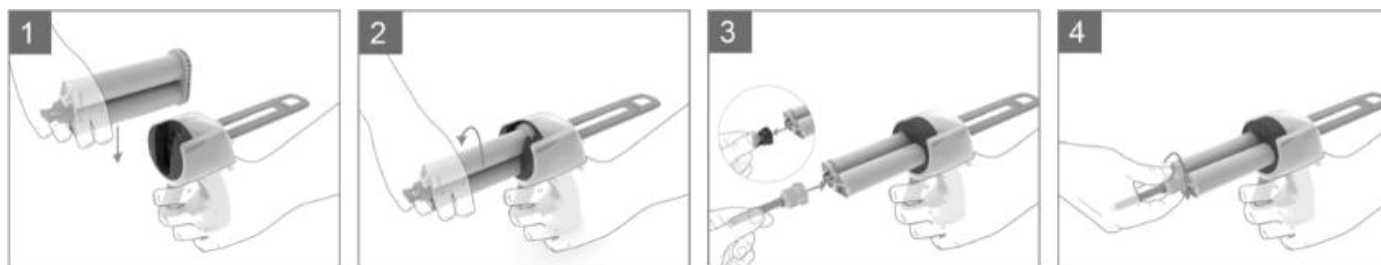

5. Při stlačení páky se materiál extruduje a automaticky promíchá v správném poměru; Může být aplikován přímo v ústech. Udržujte stabilní, nepřerušovaný tlak. Dostatečná vrstva je přibližně 5 mm. Průtok přestane, jakmile se uvolní tlak.
6. Zavřete čelist pacienta a držte jej v určeném čase.
7. Když je materiál polymerován, otevřete ústa pacienta a jemně jej vyjměte. Odstraňte přebytečný materiál z podříznutých ploch.
8. Před odložením dávkovací pistoli, kazety a směšovací hrot desinfikujte.


[Type here]

Neodstraňujte zelený hrot EcoMix BR z kazety po použití; ponechte ho na svém místě až do příštího použití, kdy bude nahrazen. Při výměně zeleného hrotu EcoMix BR zkontrolujte, zda nejsou otvory pro kazety blokovány tak, aby materiál mohl volně proudit.

ČIŠTĚNÍ A DEMONTÁŽ

Dávkovací pistole a kazety Hydrospeed HD BR lze vyčistit pomocí dezinfekčního roztoku nebo otřením.

1. Otočte úplně modrým vodicím kroužkem.
2. Podržte upínací svorku co nejvýše a odstraňte píst.
3. Pistole je rozebrána.

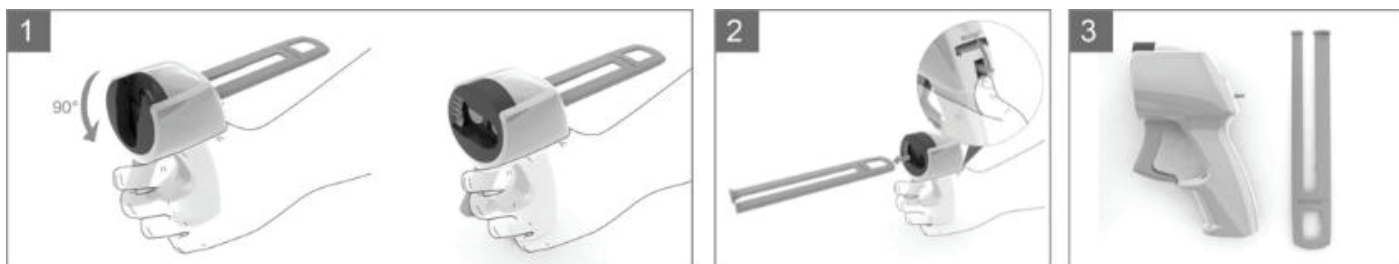

Sterilizace

Rukojeť a píst zásobníku lze autoklávovat až na teplotu 135 °C.

Dezinfekce otisku

Otisk lze vyčistit pomocí dezinfekčního roztoku. Dodržujte pokyny výrobce, zejména pokud jde o namáčení v roztoku, aby nedošlo k poškození otisku. Poté opláchněte otisk pod tekoucí vodou, abyste odstranili stopy dezinfekčního roztoku.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Nikdy nemesťujte materiály na bázi polyvinylsiloxanu se silikony kondenzací nebo polyetherovými otiskovacími materiály.
- Jakákoli taková kombinace zpozdí nebo zabrání nastavení.
- Používejte vinylové nebo nitrilové rukavice přednostně před práškovým latexem, které brání nastavení silikonových otiskovacích materiálů.
- Zabraňte kontaktu otiskovacích materiálů s rozpouštědly.

KONTRAINDIKACE

Použití tohoto přípravku může v ojedinělých případech vyvolat alergickou reakci. Okamžitě ukončete postup a poraďte se s doktorem.

SKLADOVÁNÍ

Kazety Hydrospeed HD BR nesmí být použity po uplynutí stanoveného termínu. Musí být uchovávány na suchém místě a skladovány při teplotě od -5 °C do + 30 °C. Pouze pro zubní použití. Držte mimo dosah dětí.



Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 962 226-229
www.hufa.cz
hufa@hufa.cz