

PROVITEMP

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Krátkodobý provizorní cement

Dočasný cement na bázi pryskyřice obsahující fluorid, chlorhexidin a dusičnan draselný, bez eugenolu

INDIKACE:

- Dočasné cementování korunek, můstků, inlayí, onlayí a trvalých náhrad.

VLASTNOSTI:

- ProviTemp má vynikající průtok, který umožňuje snadné a úplné usazení náhrady.
- Je dostatečně odolný proti deformaci během žvýkání. Snadné odstranění přebytků materiálu.
- ProviTemp neobsahuje esenciální oleje, takže nepoškozuje provizorní korunky. Je rovněž vysoce kompatibilní s trvalými cementy.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Zkompletujte přípravu zubu a zhotovení provizoria před vytlačením cementu. **2)** Osušte a izolujte připravený zub. Dávejte pozor, aby nedošlo k nadměrnému vysušení preparace. **3)** Odstraňte kryt z dvou-složkové Automix stříkačky a dejte stranou. Vytlačte velmi malou část nemixovaného materiálu, aby se zajistil rovnoměrný tok z obou složek stříkačky (báze a katalyzátoru). **4)** Umístěte mísící kanylu na stříkačku a uzavřete otočením o čtvrt otáčky. **5)** Vytlačte tenkou vrstvu namixovaného cementu na čistý vnitřní povrch provizoria. Máte k dispozici přibližně 45 vteřin po vytlačení namixovaného cementu. **6)** Pevně usadte dočasnou náhradu na dané místo. Počáteční gelové vytvrzení se objeví během 1,5 - 2 minut po usazení. Čištění přebytečného cementu by mělo být zahájeno bezprostředně po fázi gelového vytvrzení. **7)** K závěrečnému vytvrzení cementu dochází mezi 2,5 až 3 minutami po usazení dočasné náhrady.

TECHNICKÁ DATA:

Pracovní doba: 1 min 30 s*

Čas tuhnutí: 4 min*

* Tyto údaje byly získány za ideálních mísících podmínek: 24°C (75°F) a 40% - 60% relativní vlhkosti.

DOPORUČENÍ / VAROVÁNÍ:

Někteří jedinci mohou být citliví na tento produkt. Pokud nastane alergická reakce, přestaňte jej okamžitě používat. Pacient by se měl poradit s lékařem.

HLAVNÍ SLOŽKY:

Fluorid • Chlorhexidin • Dusičnan draselný • Metakryláty • Uretan dymetakrylát • Polymerační aktivátor.

SKLADOVÁNÍ:

- Uchovávejte v chladu. • Pouze pro použití ve stomatologii.



Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 962 226-229
www.hufa.cz
hufa@hufa.cz