

Samo-leptací a samo-adhezivní duálně tuhnoucí pryskyřičný cement pro fixaci keramiky

VLASTNOSTI:

TOTAL C-RAM je duálně tuhnoucí definitivní pryskyřičný cement, speciálně vyvinutý pro fixaci keramiky (nejen). Je samoadhezivní pro sklovinu, dentin, kov, keramiku, zirkon a kompozitum. Vhodný pro fixaci korunek, můstků, čepů, inlayí, onlayí a fazet.

Vlastnosti: Vše v jednom – leptací složka + primer + bond + cement; vazebná síla na enamel: 20 MPa, na dentin: 15 MPa; výjimečná vazebná síla na zirkon >12 MPa: duálně tuhnoucí (světlem a chemicky); extrémně tenká vrstva aplikace 10 mikrometrů; rentgenkontrastní 250% Al; může být použito na vitální zub; dlouhodobá barevná stálost; 2 odstíny k dispozici – A2 a Translucentní,

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Odstraňte dočasnou náhradu. **Poznámka:** Používejte pouze dočasné cementy, které neobsahují eugenol. Použitím dočasných materiálů obsahujících eugenol se totiž může zabránit polymeračnímu procesu produktu TOTAL C-RAM.
2. Důkladně opláchněte.
3. Vzduchem vysušte (nepřesušte).
4. Vyzkoušejte náhradu a ujistěte se, že dobře padne.
5. Před prvním použitím sjednoťte vytlačení malého množství obě složky. Nasadte mísící kanylu na stříkačku.
6. **Použití materiálu lze provést následovně:**
 - Inlay/Onlay** • Nasadte dodanou intra-orální kanylu na mísící kanylu a přímo vytlačte cement na požadovaný povrch. Umístěte náhradu jemně do přípravku, aby bylo umožněno cementu vytéct ze všech stran.
 - Korunka** • Vytlačte cement přímo do náhrady, aby byl pokryt veškerý povrch. Vložte náhradu jemně na preparaci, abyste umožnili cementu vytékat ze všech stran.
7. Je-li náhrada správně nasazena, odstraňte všechny přebytečný cement. Přebytečný cement se nejlépe odstraňuje v gelovém stavu. Gelového stavu může být dosaženo buď připevněním vytvrzeného přebytku světlem pro dobu 2 vteřin, nebo samo tuhnutím v délce 1-1,5 minuty po aplikaci. Pro dosažení co nejlepšího výsledku, nechte v klidu po dobu 1,5 minuty před vytvrzením polymerační lampou.
8. **ČASOVÁNÍ:** • Pracovní doba je 1-2 minuty. • Čas tuhnutí v ústech je 3 minuty. • Doba pro světelné tuhnutí: 20 vteřin (viz doporučení výrobce). • Po odstranění přebytečného cementu vytvrďte všechny plochy keramiky včetně okrajů po dobu 20 vteřin.
9. Použijte leštící pásy na proximální oblasti. Vyleštěte okraje leštícími disky, pohárky nebo špičkami.
10. Zkontrolujte okluzi (skus).

POZNÁMKA:

Kanyly *Automix* jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

POZOR!

Nevytvrzená met-akrylátová pryskyřice může způsobit kontaktní dermatitidu a poškození pulpy. Vyhněte se kontaktu s pokožkou, očima a měkkou tkání. Po kontaktu důkladně omyjte vodou.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte při teplotě do 24 °C (68 °F). Chladte po maximální dobu trvanlivosti. TOTAL C-RAM se nedoporučuje používat po datu expirace vyznačeném na obalu.



Uchovávejte mimo zdroje světla

Skladujte na suchém místě



Horní limit teploty



ITENA CLINICAL
www.itena-clinical.com
83, avenue Foch
75116 Paris - FRANCE
Tel.: +33 (0)1 45 91 30 08