

GC ISO FUNCTIONAL STICKS

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

ISO FUNCTIONAL STICKS

OTISKOVACÍ MATERIÁL PRO REBAZE A PODKLÁDÁNÍ

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE

Díky unikátnímu pomalému tuhnutí, umožňuje ISO FUNCTIONAL STICKS zhotovení velmi přesných otisků. Je proto obzvláště vhodný jako otiskovací materiál pro rebaze a úpravy okrajů pomocí pohybů svalů. Materiál lze rovněž použít pro celkové otisky jako zubní náhrady, povrchy kořenů a čepy.

KONTRAINDIKACE

V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

NÁVOD K POUŽITÍ

REBAZE

1. Pomocí ocelových vrtáčků a abrazivních koncovek odstraňte z náhrady okraj a povrch kontaktu se sliznicí do hloubky 2-3 mm.
2. Uvolněný povrch náhrady pokryjte ISO FUNCTIONAL STICKS, předem změkčeným nad plamenem.
3. Znovu změkčete ponořením do horké vody o teplotě 45°C (113°F). Vložte náhradu do úst a požádejte pacienta, aby skousnul a udržel náhradu v centrální okluzi. Upravte okraje pomocí pohybů svalů.
4. Náhradu je třeba ponechat v ústech 1 den, aby se vytvořovala skutečně funkční náhrada v podmínkách běžného žvýkání.

Poznámka:

Doporučte pacientovi, aby se po uvedené době vyhýbal horkým nápojům.

5. Vytvořený otisk se používá pro běžné postupy při rebazování.

POZNÁMKY

- 1) ISO FUNCTIONAL STICKS je stálobarevný, bez chuti a zápachu a nedráždí ústa pacienta.
- 2) ISO FUNCTIONAL STICKS nepřehřívejte, aby nebyl příliš lepkavý.
3. Pokud se ISO FUNCTIONAL STICKS přilepí k náhradě, nechte jej ztvrdnout a odstraňte pomocí laboratorních vrtáčků a ručních nástrojů. Zbytky odstraňte rozpouštědlem.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při běžné pokojové teplotě (23°C / 74°F).

(Trvanlivost: 3 roky)

BALENÍ

ISO FUNCTIONAL STICKS 120 g (15 kusů).

UPOZORNĚNÍ

V případě zasažení očí, okamžitě vypláchněte vodou.

Poslední revize: 02-2008



EU: GC EUROPE N.V.

Research-Park, Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

TEL: +1-708-597-0900

www.gcamerica.com

GC ASIA DENTAL PTE LTD

11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729

TEL: +65 6546 7588