

Airsonic® Mini-Sandblaster

Mini pískovačka pro intraorální i extraorální aplikace, zařízení pro abrazivní čištění povrchů.

Airsonic Mini-Sandblaster významně zvyšuje přilnavost cementů zvětšením velikosti ošetřovaného povrchu.

Instalace:

Pískovací zařízení vyžaduje stlačený vzduch o tlaku 4-8 bar. V případě, že suchý vzduch kompresoru není k dispozici, musí být instalován odlučovač kondenzované vody. Pro instalaci, budete potřebovat T-kování a spojovací hadice. (Technický servis prodejce zubní vybavení vám pomůže, je-li to nutné).

1. Přerušte stávající přívod stlačeného vzduchu, instalujte T-spojku.
2. Připojte „ženskou“ spojku s automatickým vypnutím do T- spojky.
3. Konektory pro turbíny Kavo, Sirona-Titan, Rotoquick (W & H) a Bien Air Unifix jsou k dispozici volitelně. Adaptér se jednoduše připevní na stávající koncovku turbíny a připojí k Airsonic pískovačce rychlospojkou.
4. Spojky pro laboratorní spojení a EMX Box (stará konstrukce) jsou k dispozici samostatně.

Provoz:

Přístroj je připraven k použití po připojení k přívodu stlačeného vzduchu podle v návodu k použití (viz výše). Pro pískování různých povrchů použijte Airsonic Alu-Oxyd prášek 50 mikronů (REF 605 084) respektive 90 mikronů (REF 605 086). Prášek by měl být naprosto suchý, v čistém a sypkém stavu. Vlhkost a jiné částice mohou zapříčinit ucpání. Naplňte transparentní nádobu na rukojeti ze ¾. Rukojeť držte jako kuličkové péro a tlačítko se zapínejte prstem. Vzdálenost mezi tryskou a objektem by měla být cca. 2-10 mm. Proces pískování se aktivuje lehkým **stlačením hlavy ventilu**. Čím silnější tlak na tlačítko tím je silnější brusný tlak. Trysku lze otočit o 360 °, aby bylo možné upravit optimální úhel mezi ní a objektem. V případě, že je pískovačka ucpaná vlhkým práškem, odstraňte nádobku na prášek, ucpěte prstem trysku a stiskněte tlačítko několikrát za sebou v krátkých intervalech. To zajistí zpětný chod stlačeného vzduchu v celém systému a vyčistí se tím všechny usazeniny. Touto činností taktéž ukončete každé použití pískovačky.

Bezpečnostní upozornění:

Noste vždy ochranné brýle. Nikdy nemiřte přímo do obličeje a na oči, miřte vždy jen na povrch, který chcete pískovat.

Zamezte vsání cizích abraziv. Noste vždy ochrannou roušku. Používáte-li intraorálně, doporučujeme rozhodně použít koferdam, abyste ochránili zuby a měkké tkáně. Vždy je nutné použít chirurgickou savku: ústí savky přiložte co možná nejbližší místu, které pískujete.

Záruční doba:

Výrobce zaručuje, že smluvní výrobek je bezchybný a má všechny oprávněné a / nebo dohodnuté vlastnosti. Záruční doba začíná běžet ode dne prodeje po období dvanácti měsíců. Vyloučeny ze záruky jsou poruchy a / nebo škody způsobené běžným opotřebením, nesprávným

použitím, chybou obsluhy, neopatrnou manipulací, připojením na nevhodné zdroje energie, provozem se špatným druhem el. proudu, vyšší mocí jako oheň, blesk, poškození v důsledku vlhkých, atd. V případě oprávněných nároků vad, má výrobce právo na opravu, výměnu nebo snížení kupní ceny.

Výrobce:

Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstr. 1, 47269 Duisburg

Německo

Tel .: +49 (203) 99 269-0

Fax: +49 (203) 29 92 83

www.hagerwerken.de

Produkt: Airsonic Mini-Sandblaster (REF 401 080, 401 086)

Varování upozornění: žádné zvláštní oznámení

Místo pro odkládání: čistý povrch s utěrkou na jednorázové použití, nebo papírovým ručníkem.

Skladování a doprava: Žádné zvláštní požadavky.

Čištění: Odšroubujte zásobník prášku a vysypte z něj prášek. Vyfoukněte zpětným chodem zbytek prášku z přístroje jak je popsáno v odstavci provoz. Přístroj nečistěte mechanicky a nenořte do vody, dezinfekční lázně či jiné tekutiny, riskujete tím ucpaní. Vnější části čistěte dezinfekčním ubrouskem.

Údržba: Žádné zvláštní požadavky.

Balení: Standardní balící materiál pro sterilizaci.

Sterilizace: V parním sterilizátoru při 121 ° C po dobu 15 minut.

Control / Funkční Check: Kontrola Sight na náhradu škody, opotřebení, deformace.

Skladování: Žádné zvláštní požadavky.