

Forendo™ Paste

PULPDENT®

Forendo™ Paste

Hydroxid vápenatý s jodoformem

Rentgenokontrastní – pH>12

POPIS VÝROBKU

Forendo Paste je dočasný nebo definitivní endodontický výplňový materiál určený pro rutinní použití jako výplň kořenových kanálků mezi návštěvami v ordinaci; pro léčbu abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudace, resorpce kořenů, traumatických poranění; a pro apexifikaci a apexogenezi. Pastu Forendo lze použít samostatně jako dočasné ošetření kanálků u vitálních a nevitálních pulpotomií a u pulpektomií u mléčných zubů.

Forendo Paste je netuhnoucí, předem namíchaná pasta na bázi silikonového oleje, která obsahuje hydroxid vápenatý a jodoform. Má pH>12 a je rentgenkontrastní.

INDIKACE

Ošetření kořenových kanálků

KONTRAINDIKACE

Nejedná se o tuhnoucí výplň kořenových kanálků

NÁVOD K POUŽITÍ

Dočasné ošetření kanálků

1. Pomocí vhodných endodontických postupů vyčistěte a připravte kořenový kanálek konvenčním způsobem. Vysušte kanálek.
2. Nasaďte novou jednorázovou koncovku aplikátoru bezpečně na stříkačku s luer lock.
3. Naplňte kanál jemným tlakem na píst stříkačky. Netlačte na píst silou. Pastu lze také umístit do kanálku pomocí lentulo plniče.
4. Odstraňte přebytek u vstupu do kořenového kanálku pomocí vatové tyčinky.
5. Utěsněte přístupový otvor vámi preferovaným cementem.
6. Vyhodte koncovku aplikátoru a stříkačku uzavřete ihned po použití.
7. Forendo Paste lze snadno odstranit kořenovým nástrojem a výplachem chlornanem sodným.

Ošetření mléčných zubů

1. Postupujte podle výše uvedených pokynů pro dočasné ošetření kanálků.
2. Forendo Paste není nutné odstraňovat z kořenového kanálku. Materiál se vstřebá s kořeny mléčných zubů.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

- Při dávkování ze stříkačky netlačte na píst silou. Použijte pouze lehký tlak. Pokud pasta nejde vytlačit, sejměte jehlu, odstraňte část materiálu ze stříkačky a nasaďte na stříkačku novou jehlu.
- Skladujte pevně uzavřené v původním obalu při pokojové teplotě. Chraňte před přímým světlem, extrémními teplotami, kontaminací a zdroji zapálení.
- Doba použitelnosti neotevřeného výrobku: 2 roky od data výroby.
- Ihned po použití znovu uzavřete uzávěrem.

VAROVÁNÍ

Pouze pro profesionální použití zubními lékaři. Používejte ochranné brýle a chirurgické rukavice. Zabraňte kontaktu s očima, sliznicemi a kůží. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte velkým množstvím vody. Pokud dojde ke kontaktu s očima, vypláchněte je velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ UDÁLOSTI

Jakékoli závažné nepříznivé události týkající se produktu by měly být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém k události došlo, nebo jinému příslušnému regulačnímu úřadu. Hlášení závažné nepříznivé události je třeba zaslat na adresu:

Pulpdent Corporation



80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Poznámka: Před aplikací u každého pacienta použijte jednorázové návleky/obaly na dávkovače pro opakované použití. Další informace naleznete na: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Poznámka: Seznam látek obsažených v tomto produktu naleznete v bezpečnostním listu Safety Data Sheet.

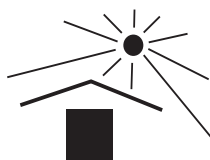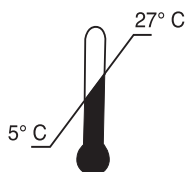

PULPDENT Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.

(617) 926-6666 / (800) 343-4342 / Fax (617) 926-6262

www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com •

XP-FOR-IN-CZ
Rev: 06/2022