

PULPDENT® Multi-Cal™

PULPDENT®

Multi-Cal™

Netuhnoucí • pH > 12 • RTG kontrastní

POPIS VÝROBKU

Pulpdent Multi-Cal je hladký, krémový, netuhnoucí hydroxid vápenatý ve vodné bázi hydroxyethylcelulózy se síranem barnatým. Doporučuje se pro všechna klinická použití, kde je indikována pasta s hydroxidem vápenatým. Je to krém, nikoli tvrdnoucí podložka a vykazuje stejné klinické výsledky jako Pulpdent Paste a TempCanal Enhanced.

INDIKACE

Přímé překrytí dřeně, pulpální kyretáž, pulpotomie, tvorba dentinového můstku, dočasné a střednědobé ošetření kořenových kanálků, periapikální cysty, abscesy a léze, resorpce kořenů, perforace kořenů a apexifikace

KONTRAINDIKACE

Nelze použít jako podložku

OŠETŘENÍ VITÁLNÍ PULPY

Multi-Cal se aplikuje přímo na pulpu při všech postupech přímého překrytí dřeně, pulpotomie a pulpální kyretáže. Stimuluje dřeň k vytvoření nového dentinového můstku, který je klinicky viditelný po 2 - 3 měsících.

POKYNY PRO PŘÍMÉ PŘEKRYTÍ DŘENĚ:

1. Na stříkačku Multi-Cal nasadte kanylu velikosti 22 a naneste velmi tenký film Multi-Cal na veškerý exponovaný dentin a osušte pomalým proudem vzduchu.
2. Umístěte kuličku Multi-Cal o tloušťce 3 mm přímo na obnaženou pulpu a osušte pomalým proudem vzduchu, dokud se neobjeví krusta. Multi-Cal neztuhne do tvrda.
3. Jemně přitlačte pastu kuličkou vaty, abyste se ujistili, že je pasta v kontaktu s dřením.
4. Naneste řídkou směs tuhajícího cementu přes Multi-Cal.
5. Až cement vytvrdne dokončete definitivní ošetření zubu.

Poznámka: Při vitální pulpotomii a pulpální kyretáži jemně překryjte pulpu sterilním krytím dokud neustane krvácení a poté postupujte jak je uvedeno výše. Lze použít lokální anestetikum.

OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ

Používejte k dočasnému zaplnění kořenového kanálku mezi návštěvami v ordinaci a jako obvaz na cysty, abscesy, léze atd. Používejte také pro apexifikaci a tvorbu jiných tvrdých tkání.

POKYNY PRO OŠETŘENÍ KOŘENOVÝCH KANÁLKŮ:

1. Připravte a vyčistěte kanálek běžným způsobem.
2. Na stříkačku Multi-Cal nasadte kanylu velikosti 22 a vyplňte kanálek pastou Multi-Cal.
3. Utěsněte vstupní otvor vámi preferovaným cementem.
4. Multi-Cal lze snadno odstranit kořenovými nástroji a výplachem.
5. V případech vyžadujících prodlouženou terapii kořenových kanálků vyměňujte Multi-Cal každý měsíc.

SKLADOVÁNÍ A DOBA POUŽITELNOSTI

- Skladujte pevně uzavřené v původním obalu při pokojové teplotě. Chraňte před přímým světlem, extrémními teplotami, kontaminací a zdroji zapálení.
- Doba použitelnosti neotevřeného výrobku: 2 roky od data výroby.
- Ihned po použití znovu uzavřete uzávěrem.

Poznámka: Pro každého pacienta použijte novou aplikační kanylu. Chcete-li prodloužit životnost Multi-Cal, kápněte kapku vody do uzávěru a stříkačku ihned po každém použití znovu zavřete.

VAROVÁNÍ

Může dráždit oči, kůži, dýchací systém, gastrointestinální trakt nebo sliznice, zvláště ve velkém množství a/nebo při dlouhodobé expozici. Pouze pro použití v zubních ordinacích. Používejte rukavice, ochranné brýle; po použití si umyjte ruce. Vyhněte se zbytečné expozici.

HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÉ NEPŘÍZNIVÉ UDÁLOSTI

Jakékoli závažné nepříznivé události týkající se produktu by měly být hlášeny výrobci a příslušnému úřadu členského státu, ve kterém k události došlo, nebo jinému příslušnému regulačnímu úřadu.

Hlášení závažné nepříznivé události je třeba zaslat na adresu:

Pulpdent Corporation


80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Poznámka: Před aplikací u každého pacienta použijte jednorázové návleky/obaly na dávkovače pro opakované použití. Další informace naleznete na: <https://www.fda.gov/medical-devices/dental-devices/multiple-use-dental-dispenser-devices>

Poznámka: Seznam látek obsažených v tomto produktu naleznete v bezpečnostním listu Safety Data Sheet.

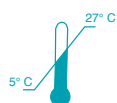

PULPDENT Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
(617) 926-6666 / (800) 343-4342 / Fax (617) 926-6262

www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com

XP-MULTI-IN-CZ
REV: 07/2022