

Návod KROMOPAN

Kromopan 100



- První alginát na světě s chromatickým fázovým indikátorem - Tixotropní - Vyrobeno se stabilními hydrokoloidy - Alginát třídy A typ 1 - Kompatibilní s každým druhem sádry

>>>

Charakteristika:

Chromatický fázový indikátor zaručuje vytvoření otisku bez nutnosti obav ze změny teploty okolí nebo tvrdosti vody. Optimalizuje míchací techniku a slouží ke správnému odhadu okamžiku vložení otiskovací lžice do pacientových úst. Model z otisku může být odlit až do 100 hodin po sejmutí otisku bez znatelných změn tvaru.

Pracovní postup: Pěčlivě promíchejte prášek s vodou. Průměrný otisk 1 odměrka prášku a 1 odměrka vody, kompletní otisk 2 odměrky vody a 2 odměrky prášku. Doba míchání 45 s při 23°C - fialová barva. Pracovní doba: 1 min při 23°C - růžová barva, čas vhodný k naložení směsi do otiskovací lžice. Doba tuhnutí v otiskovací lžici 1 min - bílá barva, čas vhodný ke vložení otiskovací lžice do pacientových úst. Doba tuhnutí v ústech 30 s. Pracovní doba může být prodloužena přidáním přípravku Personal Krono, který zpomaluje tuhnutí. Tato unikátní technika míchání Kromopanu vylučuje nesprávné otisky. Opláchněte otisk a odlijte model v průběhu 100 hodin. Otisk uchovávejte v plastickém sáčku.

Skladování otisku: V uzavřené nádobě na suchém a studeném místě. Nenechávejte volně na vzduchu nebo pod vodou.

Datum poslední revize: 09/2016

LASCOD S.p.A.-Via L. Longo 18-50019 Sesto Fiorentino – Firenze - Italy