

Silosept®



Přípravek pro ponornou desinfekci a čištění otisků a náhrad



Výrobce:
Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg/Germany
www.kettenbach.com

010842/2509

Distribuce v USA: **Kettenbach LP 7777**
Center Avenue, Suite 280 Huntington Beach,
CA 92647 USA

Pouze pro použití ve stomatologii.
Varování: Federální zákon (USA) omezuje prodej a objednání produktu pouze na stomatologie.

Přípravek pro ponornou desinfekci a čištění otisků a náhrad.

Pole působnosti: namáčení silikonových, vinylsiloxaneterových, polyeterových a alginátových dentálních otisků a také pro desinfekci dentálních protéz.

Vlastnosti: namíchaný roztok je mikrobiologicky vysoce efektivní a čistí velmi dobře již po 10ti minutách od namočení; je kompatibilní s otiskovacími materiály, které jsou rozměrově stabilní.

Aplikace: přidejte 2 odměrky (20 g každá) Siloseptu do 2 l jemně teplé vody (vznikne 2% roztok). Opláchněte otisk nebo náhradu pod tekoucí vodou a poté ponořte do roztoku. Nechejte 10 min. reagovat, poté vyjměte a opětovně opláchněte pod tekoucí vodou.

Roztok obměňujte denně.

Mikrobiologická účinnost: 2% roztok Siloseptu deaktivuje mikrobiové spektrum – bakterie, fungi, HBV, HIV a Tbb – během 10 minut dojde k jejich biologické degradaci; antivirový roztok 2% - 30 min. je snadno biologicky odbouratelný.

Speciální instrukce: Pokud byl pacient diagnostikován s TB, prodlužte reakční čas na 30 min a použijte otiskovací materiál, který je tuto aplikaci vhodný. Před použitím vyzkoušejte kompatibilitu materiálu. Přímý kontakt s pokožkou a oděvem může způsobit vybělení. Není možno vyloučit, že citliví jedinci mohou mít alergickou reakci. Při vkládání a vytahování otisků a náhrad použijte ochranné rukavice.

Složení: 100g Siloseptu obsahuje 45g Bis (peroximsulfát) bis (sulfát).

Označení dle nařízení (EC) č. 648/2204: 5 - 15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% mýdlo a fosfonáty, parfémy.

Upozornění: R36 / 38 - Dráždí oči a kůži. R52 Škodlivý pro vodní organismy. S26 - Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

Neskladujte při vyšší teplotě, než je uvedeno. Nepoužívejte po uplynutí expirace.

* Dle Robert-Koch institutu - German Federal Health Gazette 01/2004

CE 0123  800 g REF 18701



Vyrobeno
v Německu

22184-C  LOT 