



DIA-ROOT™ BIO Sealer

Předem namíchaná pasta z hlinitanu vápenatého na výplně a utěsnění kořenových kanálků

1. Indikace pro použití

DIA-ROOT BIO Sealer je kořenový výplňový materiál na bázi MTA (minerální oxidové sloučeniny), který poskytuje úplné a trvalé utěsnění kořenových kanálků. Je jej možné používat s nebo bez kořenových obturačních materiálů.

2. Návod

A. Upozornění před použitím

- 1) Před použitím produktu zkontrolujte u produktu abnormality, datum expirace, přítomnost cizích látek, nečistot a změn.
- 2) Před použitím si pečlivě a důkladně přečtěte Návod k použití

B. Návod k použití

- 1) Preparujte a irigujte kořenový kanálek pomocí standardních endodontických technik.
- 2) Nasaďte na stříkačku jednorázový hrot a vložte jej do kanálku.
- 3) Vypĺňujte kanálek za pomalého stlačování pístu, čímž se bude materiál vytlačovat do kanálku. Dbejte, abyste netlačili příliš, protože mohou vznikat bubliny a/nebo může dojít k přeplnění.
- 4) Při použití s gutaperčovým čepem vložte gutaperčový čep do kořenového kanálku.
- 5) Horní část čepu odřízněte vhodným stomatologickým nástrojem. Přebytky výplňového materiálu je možné odstranit kouskem vaty nebo vatovou peletkou navlhčenou ve vodě.
- 6) Po dokončení procedury odstraňte a zlikvidujte jednorázový hrot a nasaďte nový jednorázový hrot.
- 7) Zakryjte nový jednorázový hrot dodanou silikonovou krytkou, která hrot utěsní.

C. Skladování a management po použití

- 1) Po dokončení procedury odstraňte a zlikvidujte jednorázový hrot. Nahradejte jej novým jednorázovým hrotem a utěsněte produkt silikonovou krytkou.
- 2) Uložte do těsnícího hliníkového sáčku a uskladněte v suchu.

3. Upozornění

A. Upozornění

- 1) Tento produkt by měli používat pouze stomatologičtí odborníci a měly by být důsledně dodržovány pokyny k použití a všechna upozornění.
- 2) Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu ihned místo opláchněte hojným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- 3) Nenechte s produktem manipulovat děti a osoby pokročilejšího věku.

B. Obecná upozornění

- 1) Nevhodné skladování může zhoršit funkčnost a zkrátit životnost produktu.

- 2) Nepoužívejte tento produkt k žádnému jinému než k zamýšlenému účelu.
- 3) Pokud se obsah produktu dostane do kontaktu s očima, ihned oči vypláchněte hojným množstvím vody.
- 4) Nepoužívejte produkt po vypršení data expirace.
- 5) Neskladujte nebo nepoužívejte obsah v žádné jiné nádobě, kromě té dodané výrobcem.

C. Kontraindikace

- 1) Nepoužívejte k jinému účelu než k plnění kořenových kanálků v rámci stomatologických procedur.
- 2) Ve vzácných případech může tento produkt způsobit citlivost. V takových případech použití ukončete a konzultujte lékaře.

D. Upozornění k použití

- 1) Před zahájením procedury se musí do úst pacienta umístit kofferdam.
- 2) Materiál nevytlačujte příliš velkou silou, jinak by mohl pacient pociťovat akutní bolest.
- 3) Nevypĺňujte kanálek za apex. Přeplnění může způsobit pacientovi bolest nebo jiné nežádoucí příznaky.
- 4) Zabraňte kontaktu s vodou, není-li to záměrné, protože materiál po kontaktu s vodou ztvrdne.
- 5) Produkt by se měl až do použití skladovat v těsném obalu, aby se zabránilo předčasné reakci vlivem vlhkosti ze vzduchu.
- 6) Používejte opatrně, protože při reakci s vlhkostí se pH zvýší na 10 až 12.
- 7) Jednorázové hroty nepoužívejte opakovaně.
- 8) Tento produkt je určen k tomu, aby zůstal trvale v zubu po dobu delší než 30 dnů.
- 9) Po ošetření pořídte RTG snímek a zkontrolujte stav výplně.

4. Doba použitelnosti

2 roky od data výroby, je-li skladován a uchováván podle pokynů.

5. Symboly

Spotřebujte do

Sériové číslo

Projděte si Návod k použití

Výrobce

Autorizovaný zástupce v EU

Teplotní omezení

Uchovávejte v suchu

Uchovávejte mimo slunečního záření

Nesterilní

Pozor!

Pouze pro odborné stomatologické použití!

6. Záruka a omezení odpovědnosti

Společnost DiaDent Group International nahradí produkt, který je prokazatelně vadný. Společnost DiaDent Group International nepřebírá odpovědnost za jakákoli poškození nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použití popsaného produktu. Před použitím je odpovědností uživatele, aby si ověřil vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Uživatel v souvislosti s tím přebírá veškerá rizika a odpovědnost.

Kontaktní informace

Výrobce: DiaDent Group International
16, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu,
Cheongju-si Chungcheong buk-do, 28161, Korea
Tel: 82-43-266-2315
Fax: 82-43-262-8658
www.diadent.co.kr
diadent@diadent.co.kr

Vydání: 7. 2. 2020 (revize 1)