

Návod k použití

Sekční matricový systém Strata-G™ je navrhnut tak, aby s jeho pomocí vytvořil lékař dokonalý, anatomický bod kontaktu u kompozitních dostaveb II. třídy. Vhodně tvarované matricové pásy v kombinaci se 3 různými typy separačních kroužků, které kromě separace také dokonale adaptují tvar matrice, vytvářejí perfektní anatomický tvar dostavby.

Více informací o patentech na webu: www.garrisdental.com/patents
Nesterilní, k použití pouze v zubní ordinaci, vždy s kofferdamovou blánou.

Důležité informace k čištění a sterilizaci:

Strata-G™ Kroužky: Odstraňte před sterilizací všechny nečistoty, zbytky tkáně a použitých materiálů, nejlépe ihned po použití.

Nepoužívejte roztoky obsahující aceton nebo keton.

Sterilizujete pouze v parním autoklávu.

Strata-G™ Sekční matricové pásy: Matricové pásy jsou určeny k jednorázovému použití. Sterilizace před použitím je doporučena. Nejlépe v parním autoklávu.

Nástroje & Kleště: Pro čištění a sterilizaci nástrojů Garrison může být použit horkovzdušný sterilizátor, parní autokláv i studená sterilizace.

Strata-G™ Klínky: Klínky jsou určeny k jednorázovému použití. Ke sterilizaci použijte pouze sprejovou desinfekci. Nepoužívejte autokláv.

Kompletní pokyny pro sterilizaci najdete na:
garrisdental.com/sterilization

Technika dostavby II. třídy s použitím Strata-G kroužků


1. **Nasadte kofferdamovou blánu.** Izolace ošetřované oblasti zabrání kontaminaci slinou nebo krví. Vdechnutí malých částic může být vážnou komplikací.
2. **Umístěte destičku FenderWedge®** a lehce separujte zuby ještě před preparací. Ochráňte tak sousední zub. Preparujte zub standardně jako kavitu II. třídy. Jakmile je preparace hotová, odstraňte destičku FenderWedge® a umístěte vhodnou matici.
3. **Umístěte Strata-G™ Sekční matricový pásek.** Vyberte matici, jejíž velikost je nejbližší okluzogingivální výšce zubu, který jste preparovali. Matici umístěte vykrojením k okluzální straně. Po správném umístění můžete horní okraj ohnout přes okluzální okraj sousedního zubu. (obrázek 1)
4. **Vložte Strata-G™ klínek.** Nechte prst položený na matici, dokud neupevníte klínek. Klínek umístěte pevně, vysoce viskózní pryskyřice (kompozit) může matici vytlačit ze správné pozice. (obrázek 2)
5. **Nasadte the Strata-G™ fixační kroužek.** Vyberte vhodný fixační kroužek s ohledem na preparovaný zub a situaci kolem něj. Roztáhněte kroužek *Aplikačními kleštěmi Composi-Tight 3D Fusion™ a umístěte jej na klínek.
6. **Velmi důležité:** matricový pásek pevně přitiskněte na sousední zub v místě anatomického bodu kontaktu.
7. **Použijte obvyklé techniky leptání, čištění a lepení (bonding)** dle návodu jejich výrobce. Použijte obvyklý kompozit dle návodu výrobce.
8. **Odstraňte kroužek, klínek i pásek.**
9. **Zahleďte a vyleštěte dostavbu.**




obrázek 1



obrázek 2

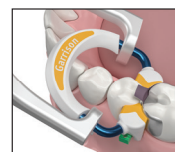

obrázek 3

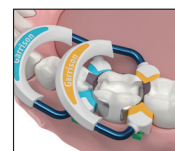

obrázek 4

Použití více kroužků & MOD dostavby

Oranžové a modré kroužky Strata-G™ jsou zakřiveny tak, aby bylo možné klást je na sebe a pohodlně tak řešit situace M.O.D. a současnou dostavbu několika zubů. Kroužky mohou být na sebe kladeny nezávisle na barvě či typu. (obrázek 4)

* (Garrison nástroj číslo FXP01 Composi-Tight® 3D Fusion™ Aplikační kleště drží mnohem bezpečněji a poskytuje dostatečnou sílu k rozevření kroužku.

POZNÁMKA: Většina kleští určených pro rozevření kofferdamových spon není zdaleka dostatečně schopna rozevřít kroužky Strata-G™ tak, aby mohly být bezpečně umístěny.)



Hu-Fa Dental, a.s.
Moravní 909
765 02 Otrokovice
Tel: +420 577 962 226-229
www.hufa.cz
hufa@hufa.cz