

## Návod na obsluhu TPC CAM 5888

### I. Zapojení

Základní části sestavy: Kamerový snímač TPC AIC- 5888 - A  
Dokovací AV modul TPC AIC-5925 - B  
Zdroj napájení pro paměťový modul  
Propojovací kabel snímač – modul  
Držák snímače  
Propojovací kabel k monitoru - S VHS  
Propojovací kabel k monitoru - VIDEO  
USB flash disk  
Hygienické návleky

### II. Uvedení do provozu

K dokovacímu AV modulu připojíme zdroj napájení do příslušného otvoru v zadní části modulu. Propojovacím kabelem S-VHS /VIDEO, HDMI – není součástí dodávky/ propojíme dokovací AV modul s LCD monitorem. Do otvoru v přední části modulu připojíme konektory kamerového snímače. Je nutné, aby byl monitor vybavený odpovídajícím obrazovým vstupem - vstupem S-VHS, Video nebo HDMI. Napájecí zdroj dovacího AV modulu připojíme do sítě s odpovídajícím napětím.

### III. Obsluha:

Vypínač dokovacího AV modulu přepneme do polohy ON. Zapneme monitor a vybereme správný obrazový vstup. Kamerový snímač zapneme stlačením tlačítka Freeze nebo se automaticky spustí vyjmutím z držáku. Vypnutí snímače se provede vložením kamerového snímače do držáku. Snímek se zaznamenává krátkým stisknutím tlačítka Freeze na kamerovém snímači. Uložení snímku se provede druhým stiskem tlačítka Freeze. Snímek bez uložení odstraníme stiskem tlačítka Quad/Full. Stiskem tlačítka Quad/Full také přepínáme kameru z režimu zobrazování jeden snímek na obrazovku na 4 snímky na obrazovku. V tomto režimu lze ukládat postupným stisknutím tlačítka Freeze všechny 4 obrázky na jednu obrazovku. Uložené snímky lze prohlížet listováním pomocí tlačítek Picture. Pomocí tlačítka Delete lze smazat zobrazovaný snímek. Mazání vyžaduje potvrzení druhým stiskem tlačítka Delete.

Snímky se ukládají na USB flash disk vložený do příslušného USB vstupu na dokovací AV modul. Pomocí tohto USB flash disku lze snímky přenášet do počítače a tam s nimi dále nakládat.

Při práci v ústech pacienta používat kamerový snímač vložený do hygienického obalu!

### IV. Údržba:

Veškeré komponenty čistit hadříkem, který nepouští chlupy, napouštěným čistícím, či desinfekčním roztokem. Používejte pouze vlhký, ne mokřý hadřík. K čištění a desinfekci používejte běžné prostředky určené pro použití na plasty.

Chraňte jednotlivé komponenty před průnikem kapalin a pádem na zem.