


OptraGate® 2

Step by step guide


Easy Size Selection

Leichte Grössenauswahl

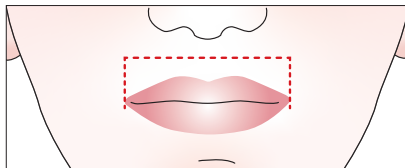


Determine the distance between the corners of the mouth by following the curve of the lips...

Ermitteln Sie den Mundwinkelabstand, indem Sie dem Lippenverlauf folgen...

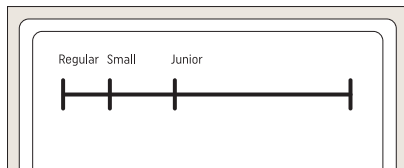



...and by making use of the guide marks on the foil bag.

...und die Orientierungshilfen auf dem Folienbeutel verwenden.

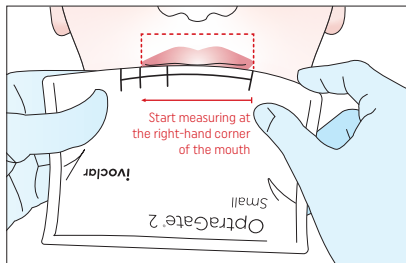

Choose the correct size based on the marks.

Wählen Sie anhand der Markierungen die korrekte Grösse aus.

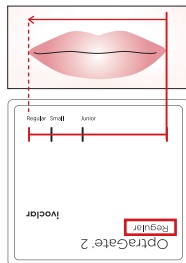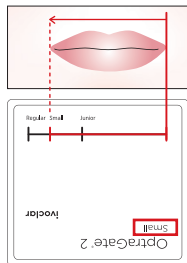

Size / Grösse

Small





Regular

Mouth corner distance approx. /


6 cm

7 cm

Mundwinkelabstand ca.

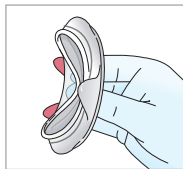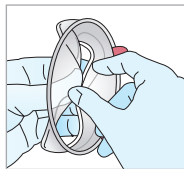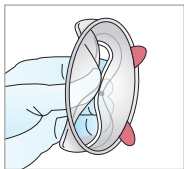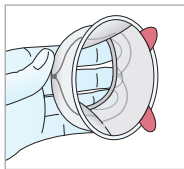


Grasp the intraoral ring (the thicker one) with your non-dominant hand and compress it so that wings form on both sides. Then take hold of the ring with the thumb and forefinger of your dominant hand. Make sure to keep the ring pressed together. Den dickeren, intraoralen Ring mit der nicht-dominanten Hand greifen und zusammendrücken bis beidseitig Flügel entstehen. Mit dem Daumen und Mittelfinger der dominanten Hand den intraoralen Ring übernehmen und zusammengedrückt halten.

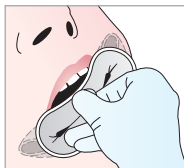

First place OptraGate 2 in the right corner of the mouth, then in the left corner of the mouth.


Zunächst in den rechten Mundwinkel einsetzen, dann in den linken.

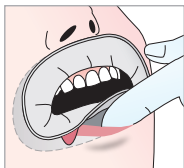

Position OptraGate 2 in the lower vestibular region. Einsetzen ins untere Vestibulum.



Position OptraGate 2 in the upper vestibular region. Einsetzen ins obere Vestibulum.

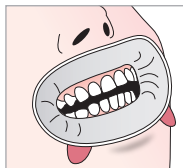

OptraGate 2 is securely positioned. The third ring, situated inside the elastic material, supports its anatomical shape. Der OptraGate 2 ist optimal eingesetzt und der dritte Ring, der auf dem elastischen Abschnitt liegt, unterstützt die anatomische Formgebung.

