

# Podpůrná vidlice



Návod k použití

# Obsah

<b>1-Úvod</b> .....	<b>01</b>
<b>2-Obsah balení</b> .....	<b>01</b>
<b>3-Instalace</b> .....	<b>01</b>
<b>4-Návod k použití</b> .....	<b>02</b>
<b>5-Ostraňování problémů</b> .....	<b>02</b>
<b>6-Údržba a čištění</b> .....	<b>03</b>
<b>7-Technické specifikace</b> .....	<b>03</b>
<b>8-Symboly</b> .....	<b>03</b>
<b>9-Záruka a technická podpora</b> .....	<b>04</b>
<b>10-Autorizovaná technická podpora</b> .....	<b>05</b>
<b>11-Autorizovaný zástupce pro Evropu</b> .....	<b>05</b>

# 1 Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Bio-Art.  
Podpěrná vidlice je příslušenství pro použití v artikulátorech Bio-Art a bylo navrženo tak, aby poskytovalo větší stabilitu litého otisku a zabránilo nežádoucímu zborcení.

# 2 Obsah balení

Sestavená sada se skládá z

následujících položek:

Část 01 - základová matice;


Část 02 - Nosný list;

Část 03 - Podpěrný šroub;

Část 04 - Výškový šroub

Část 05 - Středový čep

podpěrného listu

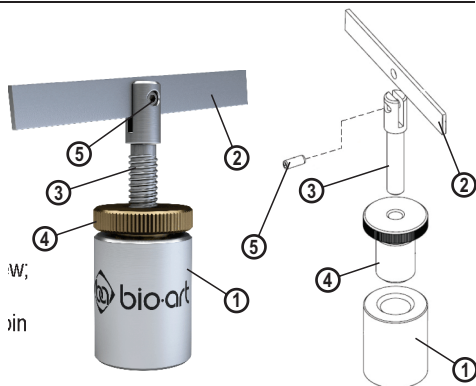

# 3 Instalace

Podpěrná vidlice by měla být namontována na spodním rámu artikulátoru a řádně zajištěna stejným šroubem použitým na montážní desce nebo magnetem rámu, jak je znázorněno níže.



## 4 Návod k použití

1. S tvářovým obloukem a příslušnou vidlicí umístěnou v artikulátoru a podpurnou vidlicí připevněnou ke spodnímu rámu artikulátoru otáčejte pouze šroubem (03) pro výběr náhledu výšky nosného listu (02) ve vztahu k vidlici;
2. Poté jednou rukou přidržte list (02) a druhou otočte šroubem pro nastavení výšky (04), dokud nedosáhne vidlice, aby podpůrná vidlice fungovala jako „klín“, čímž zajišťuje stabilitu a pevnost otisku, v artikulátoru je fixován sádrový odlitek, který zamezuje nežádoucímu zborcení;

**Poznámka:** Podpurný list (02) lze posunout v horizontální rovině, aby bylo možné jej přesně upravit při kontaktu s vidlicí.



**Upozornění:** Tato příručka obsahuje pouze základní a zjednodušené informace týkající se produktu, které nenahrazují správný kurz a školení. Podpurná vidlice je produkt určený k použití pouze speciálně kvalifikovanými odborníky v dané oblasti, kteří plně odpovídají za použitou techniku.

## 5 Odstraňování problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Problémy s manipulací (otáčením) výškového šroubu (04).	Na závitech jsou zbytky sádry	Vyčistěte závity dílů 1, 3 a 4 a ošetřete malým množstvím neutrálního maziva.
Potíže s horizontálním pohybem nosného listu (02).	Zbytky nebo nečistoty na středovém čepu (05).	Vyčistěte středový čep nosné desky (05) a namažte malým množstvím neutrálního maziva.
Potíže s připevněním základové matice (01) k dolnímu rameni artikulátoru.	Zbytky nebo nečistoty na upevňovacím závitě základové matice (01).	Zkontrolujte závity základové matice (01) a zajišťovacího šroubu montážní desky a případně je vyčistěte.

## 6 Údržba a čištění

- K čištění podpůrné vidlice používejte pouze suchý hadřík a nepoužívejte rozpouštědla, čisticí prostředky nebo chemikálie;
- K čištění nepoužívejte kovové nebo ostré předměty, v případě potřeby použijte plastovou stěrku;
- V případě potřeby namažte závit a čep (05) malým množstvím neutrálního maziva;
- S výjimkou čištění a mazání by uživatel neměl provádět žádnou údržbu. Vždy vyhledejte autorizovanou technickou podporu












## 7 Technické specifikace

Hlavní materiály použité pro podpůrnou vidlici:

Díl 01-Nerezová ocel SAE-420, Díl 02 a 03-Nerezová ocel SAE-304,  
Díl 04-Mosaz, Díl 05-Elastický čep DIN7346.

Váha: 60 gramů.

## 8 Symboly

 <i>See instructions for use</i>	 <i>Warning!</i>	 <i>Serial number</i>	 <i>Model code</i>
 <i>Authorized Representative in the European Community</i>	 <i>Date of manufacture</i>	 <i>Manufacturer</i>	 <i>Store in dry place</i>
 <i>This side up</i>	 <i>Fragile</i>	 <i>Maximum stacking</i>	

BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda. poskytuje na produkt záruku 1 (jeden) rok, počítáno od data nákupu. Záruka se vztahuje na všechny výrobní vady a je poskytována opravou zařízení podle následujících požadavků:

- Produkt byl používán správně podle pokynů popsanych v návodu k použití;
- K reklamaci je přiložena příslušná faktura a je zpracována v záruční době, následovaná zprávou popisující závadu a sériové číslo;
- Produkt je používán, přepravován a skladován opatrně;
- Náklady na dopravu (zpáteční) nese zákazník.

### Omezení záruky:

- Přirozené opotřebenění dílů;
- Zneužití, pád nebo nehody;
- Nesprávná přeprava;
- Opravy neoprávněnými osobami;
- Použití bez ohledu na vlastnosti a účely produktu;
- Opotřebenění v důsledku vystavení nepříznivým podmínkám (vlhkost, chlad a intenzivní teplo);
- Poškození v důsledku nedostatečného čištění nebo údržby nesprávnými výrobky;

### V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce:



BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará

CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502

CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113

[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)

## 10 Autorizovaná technická podpora

Kvůli vaší bezpečnosti musí technickou podporu pro tento produkt provádět autorizované osoby / společnosti. Vyhledejte autorizované servisní středisko na našem webu:

**[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br)**

## 11 Autorizovaný zástupce pro Evropu

### **Obelis s.a.**

Boulevard Général Wahis 53

1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2.732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03

E-mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)



Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará - CEP 13568-000  
São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (16) 3371-6502  
[www.bioart.com.br](http://www.bioart.com.br) - [facebook.com/bioartequipamentos](https://www.facebook.com/bioartequipamentos)