



DEZINFEKČNÍ PLÁN

DEZINFEKCE NÁSTROJŮ, OTISKŮ

SEKUSEPT AKTIV

DOBA KONTAKTU: 10 MINUT
ŘEDĚNÍ: 10 gr. prášku na 1 litr vody (1%)
ROZTOK: VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

ANIOS EXCEL CLEAN D

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ŘEDĚNÍ: 10 ml na 1 litr vody (1%)
ROZTOK: VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

ANIOSYME XL3

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ŘEDĚNÍ: 10 ml na 1 litr vody (1%)
ROZTOK: VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

DEZINFEKCE STOMATOLOGICKÝCH NÁSTROJŮ

DENTASEPT TRI-ENZYMATIC

DOBA KONTAKTU: 7 MINUT
ŘEDĚNÍ: 5 ml na 1 litr vody (0,5%)
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

MICRO 10+

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

DENTASEPT 3H RAPID

DOBA KONTAKTU: 5 MINUT
ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

REGENERACE INSTRUMENTÁRIA

ANIOS R444

ŘEDĚNÍ: 30 - 50 ml na 1 litr vody (3 - 5%)
nástroje ponořit na 60 minut,
účinek násoben v UZ

DSV a VSD

SEKUSEPT AKTIV/ANIOXYDE 1000LD

DOBA KONTAKTU: 30 min / 5 min
ŘEDĚNÍ: 20g/1l vody 2%/neředí se

DEZINFEKCE KONCOVEK, KOLÍNEK, TURBÍNEK

CITROCLOREX 2% MD

DOBA KONTAKTU: 30 sec.
roztok přímo k použití

DEZINFEKCE PLOCH - ROZTOK

SURFANIOS PREMIUM

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ŘEDĚNÍ: 5 ml na 1 litr vody (0,5%)
ROZTOK: VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

INCIDIN PRO

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ŘEDĚNÍ: 5 ml na 1 litr vody (0,5%)
ROZTOK: VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN

DEZINFEKCE PLOCH - UBROUSKY

INCIDIN OXYWIPES S (bez alkoholu)

DOBA KONTAKTU: 2 min.
UBROUSKY PŘÍMO K POUŽITÍ

INCIDIN ALCOHOL WIPES

DOBA KONTAKTU: 1 min
UBROUSKY PŘÍMO K POUŽITÍ

WIP ANIOS EXCEL (bez alkoholu)

DOBA KONTAKTU: 2 min
UBROUSKY PŘÍMO K POUŽITÍ

DEZINFEKCE PLOCH - POSTŘÍKEM

INCIDIN OXYFOAM S (bez alkoholu)

DOBA KONTAKTU: 60 sec.
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ

SURFA SAFE PREMIUM (bez alkoholu)

DOBA KONTAKTU: 2 min
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ

INCIDIN LIQUID

DOBA KONTAKTU: 60 sec.
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ

DEZINFEKCE SACÍHO SYSTÉMU

DENTASEPT ASPIRATION AF+

ŘEDĚNÍ: 20 ml na 1 litr vody (2%)

na konci dne nasátí a proplach zubní soupravy, lze nechat přes noc nebo víkend (až 72 hodin) proplach vodou

MYTÍ RUKOU

ANIOSAFE MANUCLEAR HF NPC

DOBA KONTAKTU: 30 sekund
OMÝVEJTE PO DOBU 30 sekund

SKINSAN 2% (s dezinfekčním účinkem)

DOBA KONTAKTU: 30 sekund
OMÝVEJTE PO DOBU 30 sekund

DEZINFEKCE RUKOU

ANIOSGEL 800

DOBA KONTAKTU: 30 sekund
VTÍREJTE PO dobu 30 sekund, NEOPLACHUJTE

SKINMAN SOFT PROTECT

DOBA KONTAKTU: 30 sekund
VTÍREJTE PO dobu 30 sekund, NEOPLACHUJTE

DEZINFEKCE DUTINY ÚSTNÍ (před chirurgickým zákrokem)

SKINSEPT MUCOSA

ŘEDĚNÍ a POUŽITÍ: přímo k použití, kloktat 10 - 15 ml po dobu 15 s, poté vyplivnout

DEZINFEKCE ROTAČNÍHO INSTRUMENTÁRIA

DENTASEPT SPECIAL ROTATIVE

DOBA KONTAKTU: 15 MINUT
ROZTOK: PŘÍMO K POUŽITÍ
VYMĚŇUJTE KAŽDÝ DEN